

Instruktion til brug og pleje af bademåtte

1. Sørg for at overfladen af badekarret eller bruseren er fri for rester af sæbe, olie eller rengøringsmidler.
2. Fugt overfladen af badekarret eller bruseren og tryk godt ned på alle sugekopper, og sørg for, at de har grebet godt om overfladen, før måtten trædes på. Træd altid ind på midten af måtten.
3. Sørg for at måtten forbliver flad, mens den er i brug, og at sugekopperne fortsætter med at sidde fast. Hvis det er nødvendigt, trykkes fast ned på sugekopperne igen for at sikre vedhæftning.
4. Efter brug skylles måtten grundigt for at sikre, at den er fri for sæbe, olie eller rengøringsmidler.
5. Lad måtten tørre naturligt med sugekopperne opad. Undgå længerevarende kontakt med varme eller sollys, da dette vil reducere måttens levetid. Efterlad den ikke på plads i badekarret eller bruseren.
6. Hårdt vand kan forårsage en hvidlig/brun plet på måtten, som kan fjernes med et mildt rengøringsmiddel eller maskinvask ved 40 grader. Læg om nødvendigt måtten i blød i en mild sæbeopløsning, indtil pletten forsvinder. Undgå direkte kontakt med stærke blege- og rengøringsmidler. Skyl altid i rent koldt vand.
7. Måtten er ikke egnet til brug i badekar eller bruser med en ru overflade. Måtten skal bortskaffes, når der opstår tegn på skørhed og/eller smuldring.
8. For at rengøre denne måtte, maskinvaskes den ved max 40 grader og tørrer naturligt. Til desinfektion tørres af med et mildt desinfektionsmiddel. Undgå direkte kontakt med stærkt blegemiddel eller stærke rengøringsmidler. Skyl altid i rent koldt vand.

Advarsel: Indeholder naturgummi.