



Arion Magnide® 2in1

Hjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper med lukkede tæer

Vigtig information inden du begynder at bruge produktet:

- A.** Nyttige tips:
- Brug specielle skridsikre handsker, når du bruger produktet. Det giver dig maksimalt greb om strømpen, og reducerer den nødvendige fysiske styrke.
 - Hvis kompressionsproduktet har en silikonekant, skal du sørge for at vende den udad.
- B.** Hvis du har svært ved at nå dine tæer, kan du sætte din fod på en lav stol for at undgå at bøje dig for meget.
- C.** Vigtigt! Skub ikke foden helt ind i Magnide® 2in1. Lad der være plads i tåspidsen svarende til 2-3 fingre.



Til

Instruktioner til påtagning:

1. Anbring Magnide® 2in1 på tværs af foden (sørg for, at den orange flap nær tæerne er godt foldet tilbage, så magneterne kommer i kontakt med hinanden)
2. Træk strømpen over Magnide® 2in1
3. Skub strømpen over foden, og sørg for, at strømpens hæl sidder på det rigtige sted
4. Sørg for, at den lysegrønne løkke stikker ud over strømpen, så du kan nå den
5. Træk i den lysegrønne løkke for at fjerne Magnide® 2in1 fra strømpen



Fra

Instruktioner til aftagning:

1. Skub Magnide® 2in1 over strømpen, og fjern den lysegrønne løkke
2. Fastgør velcrobåndet godt lige over anklen
3. Fold reservematerialet så langt som muligt ned over velcrobåndet
4. Fold strømpen så langt som muligt over Magnide® 2in1
5. Skub strømpen og Magnide® 2in1 over foden med små bevægelser, startende ved hælen

Se vores videoinstruktioner på uqr.to/Mgn2in1DA

Klargøring til genanvendelse af Magnide® 2in1:

- I Fastgør toppen af løkken til toppen af produktet ved hjælp af magneten
- II Vend produktet, og anbring det på en plan overflade
- III Fold begge sider med magneter mod midten, så magneterne kommer i kontakt med hinanden. De orange sømme er nu synlige på ydersiden
- IV Luk den orange flap over produktet, så magneterne kommer i kontakt med hinanden

STØRRELSER

REF	Størrelse	Skostørrelse EU	Skostørrelse UK kvinder	mænd	Skostørrelse US kvinder	mænd
E01540	Medium	≤ 38	≤ 5 1/2	≤ 6	≤ 7 1/2	≤ 6
E01541	Large	39 - 43	6 - 8	6 1/2 - 9	8 1/2 - 11	6 1/2 - 10
E01542	Extra large	≥ 44	≥ 9	≥ 9 1/2	--	≥ 11

XL er også velegnet til ekstra brede fødder (fodomkreds på op til 28 cm / 11")

Magnide® 2in1 fra Arion Slide Solutions minimerer friktionsmodstanden mellem kompressionstøj og hud takket være produktets unikke glideegenskaber, der skyldes det specielle materiale, det er lavet af, og dets belægning. Den nedsatte friktion er især nyttig, når tøjet skubbes ned over hæloområdet, som er den bredeste del af foden.

EN NEM, SIKKER OG SIMPEL LØSNING

- Reducerer fysisk belastning for både kompressionsbærere og plejepersonale
- Kan bidrage til en længere levetid for tøjet, og til at opretholde den oprindelige kompression i længere tid ved at forhindre skader på fingre eller negle, og undgå overstrækning og forvrængning
- Fremmer uafhængighed hos kompressionsbærere og støtter behandlingen

SAMMENSÆTNING

- Produkt: Polyamid 66 %, polyester 16 %, polypropylen 10 %, magneter 5 %, polyurethan 2 %, silikone 1 %
- Emballage: Polypropylen (PP)

KONTRAINDIKATIONER

- Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for en af dets bestanddele (se sammensætningen).
- Åbne sår skal dækkes med en passende forbindelse, inden produktet bruges.

⚠ ADVARSLER

- **Magnide® 2in1** indeholder flere magneter. Opbevar dette produkt i god afstand fra pacemakere og defibrillatorer. Magnetfeltet kan forstyrre udstyrets korrekte funktion (minimumsafstand = 30 cm).
- **Kvælningsfare:** Hold produktet væk fra babyer, børn og kæledyr.
- **Snublefare:** Tråd ikke på produktet. Materialet er meget glat.
- **Kun til udvortes brug/beregnet til hudkontakt.** Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

VIGTIGT

- Læs brugsanvisningen nøje.
- Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din forhandler.
- Gem emballagen og brugsanvisningen, så længe du bruger produktet.
- Alle alvorlige hændelser, der opstår ved brug af produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente tilsynsmyndighed.
- Når du bruger produktet, er det vigtigt at finde den rigtige produktstørrelse. Brug af en forkert størrelse forhindrer produktet i at fungere korrekt, og det kan blive beskadiget eller blive slidt for hurtigt. Den korrekte størrelse bestemmes af brugerens skostørrelse.
- Brug kun produktet til en enkelt person. Hvis produktet skal bruges til mere end én person, skal produktet først desinficeres med en 70 % ethanolopløsning.

OPBEVARING

Opbevares væk fra direkte sollys eller andre varmekilder.

PLEJEANVISNINGER

- Vaskes i hånden ved maks. 30 °C/86°F.
- Må ikke bleges.
- Må ikke tørretumbles. Tør kun produktet med et håndklæde.
- Må ikke stryges.
- Må ikke renses.
- Kan desinficeres med en 70 % ethanolopløsning.

GARANTI

Dette produkt er garanteret i en periode på seks måneder fra købsdatoen mod mangler som følge af defekt materiale eller konstruktion. Inden for garantiperioden byttes produktet gratis i tilfælde af produktions- og/eller materialefejl. Enhver ombytning under garantien gennemføres kun, hvis det ved en købskvittering kan påvises, at datoen for indgivelsen af klagen falder inden for garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis manglen skyldes forkert brug af produktet eller anvendelse til flere patienter. For at udnytte denne service skal du kontakte din leverandør. Du bliver bedt om at returnere produktet vasket, og at følge plejeinstruktionerne.

ANBEFALINGER TIL BRUG

Producenten anbefaler, at produktet udskiftes seks måneder efter første brug, hvis det bruges regelmæssigt.

Du kan skrive datoen for første brug på bagsiden af dette dokument.

Se vores instruktionsvideo her: uqr.to/Mgn2in1DA eller scan denne QR-kode:Få mere information på www.slide-solutions.com