



Medi Butler Off - Strømpaftager



Varenr.:

120010

HMI-nr.

19434

Medi Butler Off

Medi Butler OFF er en strømpeaftager, som anvendes til aftagning af støttestrømper og kompressionsstrømper med åben og lukket tå, samt til knælange og lange strømper, som når op til lysken.

Sådan gør du:

1. Sæt skohornet ind under strømpens kant.
2. Pres nu forsigtigt ned, så strømpen glider ned af læggen - Sørg for, at Butleren har kontakt med huden hele tiden.
3. Når strømpen er som vist på billede 3 – så løftes hælen op, så den kan komme rundt om hælen og ind under foden. Pas på: Hvis strømpen trykkes ned mod gulvet – kan strømpen gå i stykker.
4. Tryk nu strømpen fremad, indtil strømpen kommer af foden

Danish CARE Supply

Alsikevej 12, 8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply