

KRYCKKÄPP, REKO

Artikelnummer: **123370, 123420**

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.
- Max brukarvikt 120 kg. (Max brukarvikt 120 kg gäller även vid användning av två kryckkäppar.)

Avsedd användning: Kryckkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, ph 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Teknisk specifikation

Art. nr: 123370 med uppvikbar arbygel	Art. nr: 123420 med reglerbar arbygel
Vikt: 0,69 kg	Vikt: 0,67 kg
Ställbar överdel: 19-24 cm	Ställbar överdel: 21-26 cm

Ställbar höjd: 77-99 cm
Material: Aluminiumrör,
PA (arbygel för 123370),
PP (handtag samt arbygel för 123420),
naturgummi (doppskor)

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda




Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Användning:

1. Justera höjden för kryckkäppen med hjälp av tryckknappen. Kryckkäppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren.
2. Justera höjden på armbygelns med hjälp av tryckknappen. Armbygelns höjd skall anpassas efter den individuella brukaren.
3. Kontrollera tryckknapparna för höjdjusteringen regelbundet. Glappar någon av tryckknapparna måste användningen av kryckkäppen genast avbrytas.
4. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

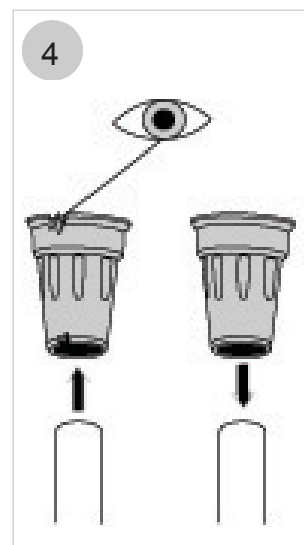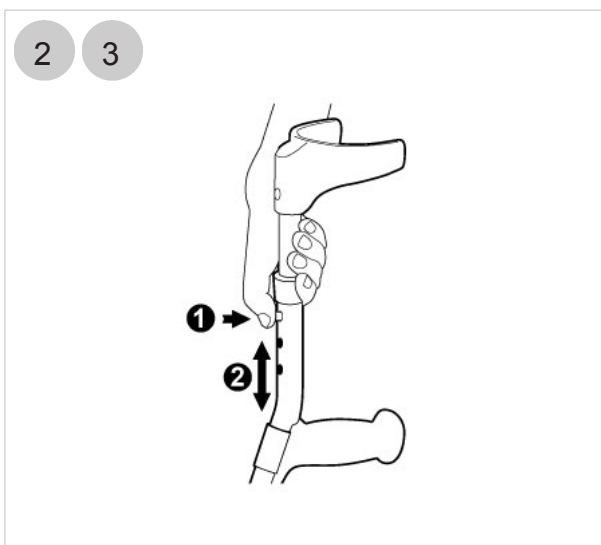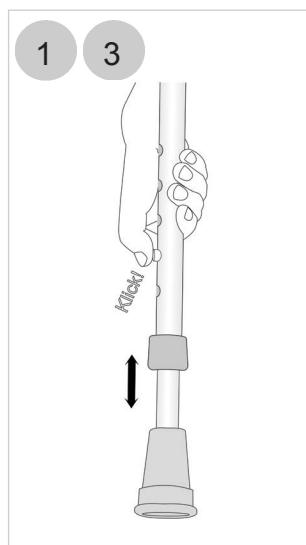

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Reservdelar:

Art. nr 120750, Doppsko

Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb Spets
Art. nr 123350, Isdubb Kronan
Art. nr 124700, Kryckpolstring
Art. nr 124885, Käpphållare Flex
Art. nr 124889, Gummifot Stabil



Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco