



# Strømpepåtager af plast



Varenr.:

141501

HMI-nr.

79673

## Strømpepåtager af plast

Strømpe påtageren anvendes til påtagning af almindelige strømper. Påtageren er fremstillet i bøjeligt plast.

Ved påtagning sættes strømpen udover strømpe påtageren, hvorefter der trækkes i de to snore, indtil strømpen sidder, som den skal.

Kan afvaskes i hånden.

Du kan se videoen på vores hjemmeside – hvis du indtaster HMI-nummer i det røde søgefelt og trykker enter – så kommer du direkte ind på strømpe påtageren.

## Specifikationer

Materiale: Bøjelig plastplade, hvortil der er fastgjort 2 lange bomuldsbånd.

Rengøring: Vaskes i hånden

Vægt: 55 g

## Danish CARE Supply

Alsikevej 12, 8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)

[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)



Følg os på

**facebook**

[facebook.com/danishcaresupply](https://facebook.com/danishcaresupply)