



Instruktionsguide til

FLEXI - STRØMPEPÅTAGER

Strømpepåtager med fleksible håndtag

FLEXI - strømpepåtager findes i 2 udgaver; til enkelt-strømper og til strømpebukser.

Den kan anvendes til almindelige strømper, nylonstrømper, strømpebukser og kompressionsstrømper af type 1 og 2. Vi anbefaler, at der anvendes handsker i påtagning af kompressionsstrømper. En særlig fordel ved FLEXI er, at borgerne ikke behøver at vinkle foden og kan sidde på stolen, mens strømpen trækkes på. Lægomkredsen må maksimalt være op til 40 cm.



HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Stativ mål		
			Bredde	Højde inkl. Håndtag	Bredde på bøjle til strømper
89518	180005	FLEXI - Enkelt-strømper	20,5 cm	56 cm	12 cm
89519	180006	FLEXI - Strømpebukser	38 cm	56 cm	12 cm

Materiale: Hvidlakereret stål.

Rengøring: Kan afvaskes med sprit, eller ved håndvask.



Youtube
Video



HMI-Basen
Manual



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere

Påtagning: Enkelt-strømpe



1. Træk strømperne på FLEXI påtageren til strømpens hæl kommer til syne øverst. Brug handsker til dette for at skåne hænderne.



2. Sæt stativet ned mellem benene.



3. Før foden ind i strømpen.



4. Træk strømpen op, og træk strømpepåtageren af.



5. Fordel kompressionen med handskerne.



Påtagning: Strømpebukser



1. Træk strømperne på FLEXI påtageren til strømpehæl kommer til syne øverst. Ved kompressionsstrømper anbefaler vi, at der bruges handsker for at skåne hænderne.



3. Placér påtageren, så den ligger fladt på gulvet.



4. Før fødderne ind i strømperne. først den ene og så den anden og træk strømpen op.



5. Tag nu strømpepåtageren af.



6. Træk strømpen på. Ved kompressionsstrømper kan vi anbefale at sætte et glidestykke rundt om låret, samt brug af handsker.



Hvem er vi?



Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler til private borgere, virksomheder og kommuner.

Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og afklædning, køkkenet, spisning, personlig pleje, badet, toiletbesøg, dagligstuen og sengen.

Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres arbejde med borgerne.

Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, ved telefonisk kontakt eller i vores fysiske butik.

Vi står klar med gode råd og vejledning i valget og brugen af alle vores hjælpemidler.



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danish CARE Supply

Alsikevej 12

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply