



Knappekrog



Varenr.:

180008

HMI-nr.

19443

Knappekrog

Knappe og lynlåshjælperne kan anvendes som hjælp til at lukke knapper og trække op i lynlåsen. Ved brug af knaplukkeren føres metaldelen igennem knaphullet. Sæt metaldelen omkring knappen, og træk herefter tilbage, så knappen sidder i den smalle ende af metaldelen - det sikrer at knappen ikke falde af metaldelen. Træk herefter knappen gennem knaphullet. Træk hele metaldelen tilbage gennem knaphullet igen. Tag forsigtigt knappekrogen af knappen.

Specifikationer

Bredde på håndtag: 4 cm

Bredde knappehoved: 1,2 cm

Længde: 21 cm

Vægt: 40g

Materiale: Plast

Rengøring: Autoklave, afspritning eller håndvask.

Danish CARE Supply

Alsikevej 12, 8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply