



# Danish CARE Supply – Manual til greb med sugekop

Varenr	Navn	Længde
180118	Greb med sugekop - Kort	35 cm
180119	Greb med sugekop - Lang	50 cm

## Instruktion:

Grebet med sugekop er designet til kun at blive brugt på glatte overflader såsom klinker og fiberglas.

- Er ikke egnet til træ eller malede overflader.
- Er ikke beregnet til at rejse sig fra. Skal kun anvendes som støttegreb.
- Før installeringen skal du sikre dig at væggen er slid og stabil.
- Rengør den valgte overflade.
- Placer ikke sugekoppen på fugningen mellem klinker.
- Se standen på sugekopperne. Er disse beskadiget eller revnet må de ikke anvendes.
- Placer ikke sugekoppen hvor den får direkte sollys.
  
- De blå håndtag skal være rejst, når du placere støttegrebet.
- Tryk først det ene håndtag ned, og derefter trykkes det andet håndtag ned. Du bør mærke modstand når sugekopperne begynder at sidde fast.
- Indikatoren viser grønt, hvis sugekopperne sidder ordentligt fast. Grebet sidder ikke ordentligt fast på væggen, hvis indikatoren viser rødt. Kig derfor altid på støttegrebet om indikatoren viser grøn, før brug.
- For at fjerne dem løsnes de to blå håndtag blot. Hvis sugekopperne stadig sidder fast, så brug din finger til at løfte kanten.



Alsikevej 12, Randers NV  
Telefon: +45 2211 8616

  
Danish CARE Supply®  
- fremtidens hjælpemidler

dcs@danishcaresupply.dk  
www.danishcaresupply.dk