



Instruktionsguide til

DressBuddy Aftager

Beregnet til aftagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

Henvender sig til borgere, der skal være selvhjulpne i aftagning og som ikke kan bukke sig ned og nå sine fødder.

Det er muligt at tage kompressionsstrømperne af med én hånd. I sættet medfølger friktionsplade som tilbehør.



HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Person mål		Stativ mål	
			Personhøjde i cm	Lægomkreds i cm	Bredde i cm	Længde i cm
72542	1032	SÆT - 2 dele - AFTAGER - MELLEME	Op til 185	Op til 40	16	60
74617	1033	SÆT - 2 dele - AFTAGER - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
73687	1034	SÆT - 2 dele - AFTAGER - MELLEME OG BRED	Op til 185	Over 40	19	60
74616	1035	SÆT - 2 dele - AFTAGER - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70
72541	2022	ENKELT - AFTAGER - MELLEME	Op til 185	Op til 40	16	60
74613	2023	ENKELT - AFTAGER - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
73686	2024	ENKELT - AFTAGER - MELLEME OG BRED	Op til 185	Over 40	19	60
74615	2025	ENKELT - AFTAGER - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70

Materiale: Rustfri stål.

Rengøring: DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask. Friktionsplade kan vaskes i hånden ved max 30° C.



Youtube
video



HMI-Basen
Manual



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere

Aftagning



1. Læg friktionspladen på gulvet mellem fødderne.



2. Sæt de blå kugler på DressBuddy'en lige indenfor kantbåndet bag på læggen.



3. Skub DressBuddy'en ned langs benet og sæt den på friktionspladen.



4. Træk benet bagud, så strømpen trækkes ned til anklen.



5. Gnid hælen fremad på friktionspladen med små korte ryk.



6. Indtil strømpen er helt af foden.



Tips og tricks



1. Hvis borgeren har sårbar hud --> Lav en fold på strømpen ved aftagning, så kuglerne ikke kommer i berøring med huden.



2. Hvis borgeren har svært ved at anvende friktionspladen eksempelvis pga. for få kræfter i benet eller vanskeligheder ved at koordinere bevægelsen --> Anvend DressBuddy aftager på hjul (billedet).



3. Hvis borgeren har svært ved at få foden ud af strømpen--> Det skyldes ofte at de blå kugler sidder for langt nede i strømpen eller for langt fremme i strømpen og derved mindskes elasticiteten. Husk at de blå kugler skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet og bagpå benet (billedet).



4. Hvis borgeren ikke har kræfter til at skubbe strømpen af --> Anvend andet glidestykke eksempelvis Slip åben tå, Easy of.



5. Elektrisk aftager ORT.O.MATE.

Til borgere som ikke kan blive selvhjulpne i aftagning af kompressionsstrømper ved brug af andre typer hjælpemidler.



Hvem er vi?



Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler til private borgere, virksomheder og kommuner.

Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og afklædning, køkkenet, spisning, personlig pleje, badet, toiletbesøg, dagligstuen og sengen.

Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres arbejde med borgerne.

Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, ved telefonisk kontakt eller i vores fysiske butik.

Vi står klar med gode råd og vejledning i brugen af alle vores hjælpemidler.



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danish CARE Supply

Alsikevej 12

8900 Randers C

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply