



Instruktionsguide til

DressBuddy Påtager

Beregnet til påtagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

Henvender sig til borgere med nedsat bevægelighed i ankel, samt borgere med hel eller delvis lammelse.

Det er muligt at tage kompressionsstrømperne på med én hånd.

I sættet medfølger friktionsplade og glide-stykke som tilbehør.



HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Person mål		Stativ mål	
			Personhøjde i cm	Lægomkreds i cm	Bredde i cm	Længde i cm
72538	1030	SÆT - 3 dele - PÅTAGER - MELLE	Op til 185	Op til 40	16	50
74607	1031	SÆT - 3 dele - PÅTAGER - LANG	Over 185	Op til 40	16	60
74608	1028	SÆT - 3 dele - PÅTAGER - MELLE OG BRED	Op til 185	Over 40	19	50
74609	1029	SÆT - 3 dele - PÅTAGER - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	60
72539	2040	ENKELT STK. - PÅTAGER - MELLE	Op til 185	Op til 40	16	50
74610	2041	ENKELT STK. - PÅTAGER - LANG	Over 185	Op til 40	16	60
74611	2042	ENKELT STK. - PÅTAGER - MELLE OG BRED	Op til 185	Over 40	19	50
74612	2043	ENKELT STK. - PÅTAGER - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	60

Materiale: Rustfri stål.

Rengøring: DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask. Slip-Fod og friktionsplade kan vaskes i hånden ved max 30° C.



Youtube
video



HMI-Basen
Manual



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere


Påtagning



1. Placér friktionspladen på gulvet mellem fødderne.



6. Træk strømpen halvt op på læggen.

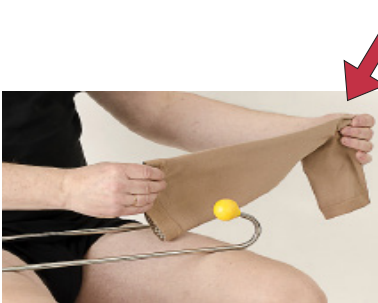

2. Læg DressBuddy'en på lårene med de gule kugler opad. Læg strømpen med hælen opad.



7. Gnid hælen fremad på friktionspladen med små korte ryk, så strømpen kommer på plads ved hælen.



3. Sæt strømpens kantbånd på en kugle ad gangen.



8. Træk i DressBuddy'en indtil strømpen er helt på.



4. Put slippet ned i strømpen. Brug den ende på slippet uden velcrolukning.



10. Tag kantbåndet af kuglerne og træk i den del af slippet, som vender væk fra huden.



5. Lad de gule kugler pege ind mod dig, før foden ind i strømpen og træk op i DressBuddy'en.



Tips og tricks



1. Hvis borgerens tæer er tilbøjelige til at sidde fast i strømpen --> Anvend den ende af slippen med velcrolukning, så tæerne kan "pakkes ind" i slippen.



2. Hvis borgeren har problemer med at få foden helt ind i strømpen --> Drej da DressBuddy'en rundt om hælen, samtidig med at du trækker i den.



3. Hvis borgeren har svært ved at få foden helt ned i strømpen --> Skyldes det ofte, at de gule kugler sidder for langt nede i strømpen og derved mindsker elasticiteten. Husk at de gule kugler skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet i strømpen (billedet).



4. Hvis der er folder på strømpen --> Før de gule kugler hen over folderne, så de forsvinder.





Hvem er vi?

Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler til private borgere, virksomheder og kommuner.

Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og afklædning, køkkenet, spisning, personlig pleje, badet, toiletbesøg, dagligstuen og sengen.

Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres arbejde med borgerne.

Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, ved telefonisk kontakt eller i vores fysiske butik.

Vi står klar med gode råd og vejledning i brugen af alle vores hjælpemidler.



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danish CARE Supply

Alsikevej 12

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply