



Brugervejledning til Rygerobot, lille model

Rygerobotten giver mulighed for at ryge uden at være i direkte kontakt med cigaretten. Den nedsætter faren for at tabe gløder/aske.

Cigaretten fastgøres i en holder over askebægeret. Holderen er forsynet med en slange, hvorpå der er monteret et rygemundstykke.



- Skru slangen fast i askebægeret, og rygerobotten er nu klar til brug
- Placér altid rygerobotten på en plan og brandhæmmende flade. Sørg samtidig for at rygerobotten står stabilt og ikke kan falde ned.
- Sæt cigaretten i holderen - Tænd mens der suges gennem slangen
- Resterne af den udbrændte cigaret fjernes ved at skubbe ringen/omløberen ned, og derefter fjerne skodet.

Tilbehør:

Der kan tilkøbes en ekstra slange med varenr: 260012

HMI nr:	26438
Varenr:	260005
Mål:	Slangen er 100 cm og har en indvendig diameter på 3 mm.
Rengøring:	Rengøring af slangerne skal helst være i sulfo vand (opvaskemiddel). Lægges i blød i en times tid og hænges til tørre. Slangerne udskiftes efter behov. Rengør gerne slange efter behov.

Danish CARE Supply har et stort udvalg af Brandhæmmende hjælpemidler, herunder rygetæppe, rygeforklæder mm. Se mere på vores hjemmeside: www.danishcaresupply.dk

For yderligere information kan vi kontaktes på:

Danish CARE Supply - Alsiketvej 12, 8920 Randers NV - Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk - www.danishcaresupply.dk