


Instruktions-vejledning til alle medi- butlere



1.

Sæt først medi butleren på en fast flade med den brede side af bunden vendt mod dig og åbningen i den halvrunde ramme vendt fremad. Sæt kompressionsstrømpen i bøjlen med strømpetåen vendt fremad. Vend indersiden ud og over rammen på den øverste kant af strømpen.

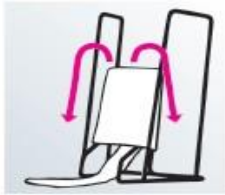

2.

Før strømpen ned over bøjlen, indtil hælen kommer til syne ved



3.

Anbring nu medi butleren på gulvet. Før foden med tæerne først ind i tåen på strømpen. Det anbefales, at du læner dig mod noget fast (bord, væg) for at opnå stabilisering.



4.

Træd nu ind i stativet. Kontrollér at tåen og hælen er korrekt placeret.



5.

Ved skiftevis at trække i håndtagene kan du nu føre strømpen op mod knæet.



6.

Når strømpen er lige under knæet, skal du vippe medi butleren let tilbage og fjerne den fra strømpen.



7.

Slut af med at glatte kompressionsstrømpen jævnt opad. Sørg for at trække strømpen op stykke for stykke uden at samle den sammen eller trække i kanten.