

## Produktbeskrivelse og tilsigtede formål

Rullevoanen med bakker er ideel til indendørs hjemmebrug. Den stærke og alsidige ramme kan justeres i højden og er forsynet med to bakker for at give brugerne et mere sikkert middel til at flytte genstande rundt i hjemmet. Den nederste bakke er sat længere fremover for, at give brugerne mulighed for at gå naturligt, når de skubber.

## Produkt egenskaber

- Pulverlakeret stålramme med to stive plastbakker
- Hævede kanter på bakker hjælper med at forhindre spild
- Nederste bakke er sat fremskudt for at tillade en naturlig gang
- Højdejusterbar for at kunne tilpasse flere typer brugere



## Tekniske specifikationer

### Mål (mm)

- Håndtagshøjde (midtpunkt): 840 - 990 (33" - 39")
- Samlet bredde og dybde 458 x 545 (18" x 21½")
- Bakkestørrelse: 310 x 430 (12" x 17")

- Hjulenes diameter 100 (4")

**Max vægt bakke:** 5kg (11lb) **Maximum**

**Max brugervægt:** 20st (127kg) **Produkt**

**Vægt:** 8kg (1¼st)

## Samlevejledning: *(Note: for detaljeret information læs Brugs- og samlevejledningen)*

- Produktet skal samles før brug
- Samlingstid er cirka 5 minutter
- Der kræves ingen special kendskab eller værktøj for at samle dette produkt

## Sikkerhedsforanstaltninger

- Brug ikke vognen som ganghjælp eller som erstatning for en rollator
- Brug ikke vognen som hjælp, hvis du skal rejse dig fra siddende stilling
- Forsøg ikke at sidde på vognen
- Overbelast ikke bakkerne. Når det er muligt, er det tilrådeligt at placere emner centralt.
- Brug ikke serveringsvognen udendørs

## 380166 Serveringsbord på hjul

### Rengøring

- Rengør regelmæssigt med et almindeligt, neutralt rengøringsmiddel og varmt vand.
- Hvis det er nødvendigt, kan bakkerne fjernes for rengøring, ved blot at løsne dem fra rammen. For at montere igen skal du sætte clipsene på forsiden af bakken i grebet på det forreste tværrør og fastgøre det ved at klemme den bagerste kant af bakken på det bagerste tværrør.
- Kontroller venligst egnetheden af rengøringsmidlerne før brug. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller klude, da disse permanent beskadige overfladen og ugyldiggøre enhver garanti.
- Lad produktet tørre grundigt inden brug.

### Pleje & vedligeholdelse

- Kontroller regelmæssigt hjulenes tilstand og fjern enhver ophobning af støv og snavs.
- Kontroller, at bakkerne er forsvarligt monteret og er i vater før brug.
- Kontroller, at alle fastgørelsesklemmerne er sat rigtigt i, og at der ikke er for stor bevægelse.
- Tjek med jævne mellemrum vognen for tegn på slid. Enhver formodet fejl eller skade skal straks rapporteres til leverandøren og produktet tages ud af brug.

### Anbefalet tilbehør

- 330003 — Non-slip ruller - sort, beige eller hvid
- 680015 — Non-slip - fås i flere farver
- 680021 — Non-slip rulle - Fås i 4 forskellige farver

### Ofte stillede spørgsmål

- Låser hjulene?  
*Nej*
- Drejer hjulene?  
*Ja, hjulene roterer 360°.*
- Kan man fjerne bakkerne?  
*Ja, bakkerne kan tages af for rengøring.*
- Hvordan måler jeg den rigtige højde for håndtagene?  
*Stå med fødderne fladt på gulvet, i dit sædvanlige fodtøj, med armene løst i siderne og mål højden fra gulvet op til dit håndled.*

### Produktets forhandler er :

**Danish CARE Supply** Alsikevej 12, 8920 Randers NV, Tlf. 2211 8616, E-mail: DCS@danishcaresupply.dk  
Webshop: [www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)