

Brugsanvisning

GRIBETÆNGER, AKTIVE

Varenr: 138040, 138050, 138060,
138070, 138080, 138100

Anvendelsesformål: Gribetænger er et hjælpemiddel beregnet til at kunne nå og samle ting op med.

Sikkerhedsanvisninger:

- Produktet bør ikke bruges på en anden måde, end det er beregnet til.
- Gribetangen er ikke til at løfte tunge genstande. Dette skyldes, at tunge genstande kan forårsage skade på personer og ejendom, hvis brugeren taber genstanden.
- Tangen må ikke bruges til at vride, knække eller trække andre genstande.
- De led, der går ud til selve gribekloen, er bevægelige og udgør derfor en klemme-risiko, hvis brugeren placerer fingrene mellem ledarmen og stignøjlen.
- Magneten for enden af håndtaget, kan påvirke andre genstande. For eksempel kan magneten udgøre en risiko for at afmagnetisere kreditkort, hvis den placeres for tæt på.
- Tjek gummi-hætterne på griberen før brug, beskadigede eller slidte hætter kan betyde et reduceret greb.
- Beskadigede eller slidte hætter på gribekloen skal udskiftes med nye, som kan bestilles hos Danish CARE Supply

Tekniske specifikationer

Varenr: 151240 HMI nr: 20210 GRÅ Længde: 40 cm Vægt: 0,19 kg	Varenr: 138050 HMI nr: 20211 GUL Længde: 50 cm Vægt: 0,22 kg	Varenr: 138060 HMI nr: 20212 GRØN Længde: 60 cm Vægt: 0,24 kg	Varenr: 138070 HMI nr: 20213 RØD Længde: 70 cm Vægt: 0,27 kg	Varenr: 138080 HMI nr: 20214 BLÅ Længde: 80 cm Vægt: 0,28 kg	Varenr: 138100 HMI nr: 20215 SORT Længde: 100 cm Vægt: 0,34 kg
--	--	---	--	--	--

Materiale: Stålrør, højfriktionsplastik (hætter), ABS (håndtag)

Rengøring og vedligeholdelse: Rengøres jævnligt om nødvendigt (min. 1x/måned) med sæbeopløsning, ph 5-9. Ved skift af bruger skal produktet desinficeres, autoklaveres ved maks. 85° i maks. 3 minutter. Tør alternativt med 70% isopropanol.

Reserve dele:

Varenr 138045, et sæt gumi-hætter / Gummidupper

Genbrug:

Når produktet er brugt op, genanvendes det som metalskrot og plastaffald. Emballagen består af plast og bølgepap og genanvendes derefter.



Fremstillet af:
Swereco AB Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda Tel: +46
(0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com

