


Mobilitetshjælpemidler • 4-punktstøtte • Gangstativ		Varenr: 147021 - HMI nr: 87406
Gangstativet er et ganghjælpemiddel til bevægelseshæmmede.		Användaranvisning 1) Juster højden på gangstativet ved hjælp af trykknappen. Højden på gangstativet skal tilpasses den enkelte bruger. 2) Kontroller trykknappen for højdejustering regelmæssigt. Hvis trykknappen kompromitteres, skal brugen af gangstativet straks stoppes, og produktet sendes til service. 3) Kontroller støttefødderne før brug. Beskadigede eller slidte støttefødder skal udskiftes med nye.
Producent	Swereco	
Betegnelse	Gangstativ	
Vare nr	147021	
Højde	85-97 cm	
Bredde	60 cm	
Dybde	48 cm	
Max Brugervægt	120 kg	
Materiale	Aluminium	
Genbrug	Skrot og plastaffald, emballage i bølgepap, sorteret efter lokale anvisninger	
Opbevaring	Stuetemperatur	
Formodet holdbarhed	ca 5 år ved normal brug	
Øvrig information		

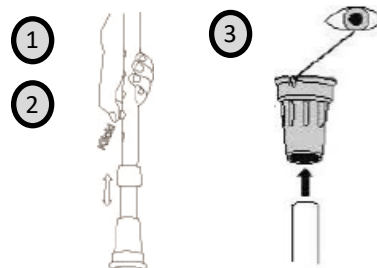

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Kan vaskes med alkalisk sæbeopløsning, pH 5-9.



Vaskes i max 85 °C i max 3 minutter.



Foretag altid en visuel kontrol før brug



Inneholder Polypropen og Aluminium



Produkten følger (EU) MDR 2017/745 og 2007/47/EG for medicintekniske produkter.



Varenr. 147021

Sikkerhedsanvisning

- Produktet bør ikke anvendes på nogen anden måde end beregnet.
- Gangstativet bør kun bruges på fladt underlag. Når du bevæger dig, skal gangstativets fire ben stå fast på jorden for at undgå forkert belastning. Den maksimale brugervægt beregnes med alle fire ben i jorden.
- Produktet skal justeres af kompetent personale (f.eks. ergoterapeut, fysioterapeut eller tilsvarende) for at blive tilpasset den enkelte brugers specifikke behov.
- Kontroller regelmæssigt, at højdejusteringsknappen ikke glider.
- I tilfælde af tegn på, at højdejusteringen er løs, eller at produktet på anden måde er slidt, skal produktet straks tages ud af brug og sendes til service.
- Kontroller regelmæssigt, at dupskoene ikke er slidte eller beskadigede. Beskadigede eller slidte dupsko kan betyde et forringet greb.
- Beskadigede eller slidte dypesko skal udskiftes med nye, som kan bestilles hos Swereco.
- Produktet må ikke læsses med genstande som tøj, tasker eller lignende under brug.



I tilfælde af alvorlige produktfejl/hændelser skal du kontakte Danish CARE Supply

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



Fremstillet af
Swereco AB
Vagnvägen 4 364 42
Lenhovda

(2023_02)