



Inkontinens sengeunderlag med sidestykker – 85 x 150 cm.

Beskyttelseslaget har en vandtæt barrierelag i bunden og en kerne af stærkt absorberende materiale. Lagnets overflade består hovedsageligt af bomuld, som føles behagelig. Beskyttelseslaget er lamineret, hvilket gør det meget kraftigt, og resulterer i en glat


overflade uden risiko for indvendige folder. Beskyttelseslaget har sidestykker, som kan fastgøre lagnet til sengen/madrassen.



Brugsanvisning: Vask beskyttelseslaget før brug for at aktivere absorberingsevnen. Placér beskyttelseslaget på sengen med logo-siden mod madrassen. Fastgør beskyttelseslaget med vingerne/sidestykkerne rundt om madrassen.

Tag et fast greb om den tykke og laminerede del, når underlaget skal lægges på sengelagen.

Sørg for, at beskyttelseslaget er tilpasset sengens bredde.

Varenavn	Inkontinens sengeunderlag med sidestykker - 85x150 cm
Varemærke	Sanicare
Varenr.	310092
Antal produkter, stk.	1
Vægt	680 g
Samlet areal	85x25 cm
Overflade, LxB	150 x 85 cm
Absorberingskapacitet SS 8760033:2015	1668 ml (+/- 49 ml)
Overflademateriale	100% Polyester
Underlagsmateriale	100% Polyester
Sidestykke	50% Polyester, 50% Bomuld
Barrierelag	Polyuretan
Absorberingsmateriale	95% Polyester, 5% Rayon
Rengøring	 Ved afføring eller blodpletter skal liggeunderlaget skylles i koldt vand hurtigst muligt.
Antal vaske	Ca. 450 (normal husholdningsvask)
Bortskaffelse/sortering	Brændbart affald, sorteres efter lokale anvisninger
Opbevaring	Stuetemperatur, ikke i sollys
Øvrig information	Produktet indeholder ikke PVC



Produktet overholder EU's grundlæggende sundheds-, miljø- og sikkerhedskrav



OEKO-TEX® betyder at produkterne er fremstillet på en miljøvenlig måde



SRN SE-MF-000033314



Sørg for, at syninger og materialer er komplette og ubeskadiget.

Ved tegn på slid skal produktet kasseres.

Bemærk, at der stadig er risiko for at glide ud, efter hver bevægelse / position, skal der træffes en risikovurdering med udgangspunkt i andre sikkerhedsforanstaltninger!

Læg **altid** sidestykkerne indunder madrassen.

Bemærk! Produktet er ikke beregnet til at løfte personer.

Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med genstande og enheder, der udsender høj varme.