

## Rund badetaburet, justerbar

Varenr: 134051 - HMI nr. 85033

### Sikkerhedsanvisninger:

- Produktet bør ikke anvendes på anden måde end den er beregnet til.
- Taburetten er ikke beregnet til brug i badekar.
- Taburetten skal placeres på en plan overflade, hvor alle fire ben står fast mod gulvet.
- Den må ikke vinkles op i en sådan position, at den kun står på to ben, når brugeren sidder på den. Det skyldes, at den maksimale brugervægt beregnes med alle fire ben i gulvet.
- Den må ikke flyttes samtidig med, at brugeren sidder på den.
- Før brug skal du sørge for, at højdejusteringsclipsen er trykket godt ned.
- Når der udskiftes clips, skal du sørge for, at det er til den rigtige model.
- Hvis der er tegn på, at højdejusteringen er løs, eller at produktet på anden måde er slidt, skal produktet tages ud af brug og sendes til service.
- Højden må ikke justeres, mens brugeren sidder på den.
- Gummifødderne skal kontrolleres regelmæssigt. Beskadigede eller slidte gummifødder kan resultere i et reduceret greb.
- Beskadigede eller slidte gummifødder skal udskiftes med nye, som kan bestilles hos Danish CARE Supply.
- Max brugervægt er 130 kg.

**Tilsligtet anvendelse:** Taburetten er beregnet til at sidde på, mens du er i brusebad.

### Symboler: Forklaring af symboler på produktet og i brugsanvisningen.



Max 130 kg

Max sikker brugervægt



Kan vaskes med Alkalisk sæbeopløsning, ph 5-9.



max  
85°C  
3 min

Vaskes i max 85°C i max 3 minutter.



Visuell kontroll



Produkten følger (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG for medicintekniske produkter.

### Tekniske specifikationer

Sædestørrelse: Ø 40 cm.

Vægt: 1,9 Kg

Indstillelig højde: 45-55 cm

Materiale: Aluminum, PP (sæde), TPE (gummifødder)



Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug, skal rapporteres til Danish CARE Supply.

Fremstillet af

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)8 5000

5240



[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

# Brugsanvisning

## Samle- og brugsvejledning:

1. Saml taburetten som vist på billederne.
2. Til justering af højden. Skub clipsen væk fra benet, juster til den korrekte højde, og tryk derefter clipsen på plads igen. Kontroller at clipsen er trykket godt ind før brug. Hvis et gammelt clips udskiftes med et nyt, skal du kontrollere, at det har den korrekte størrelse. (fås i flere størrelser)
3. Kontroller gummifødderne før brug. Beskadigede eller slidte støttefødder skal udskiftes med nye.

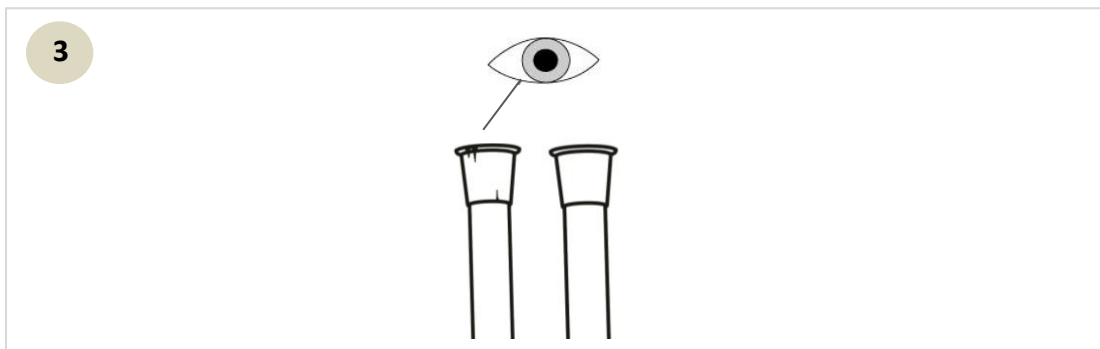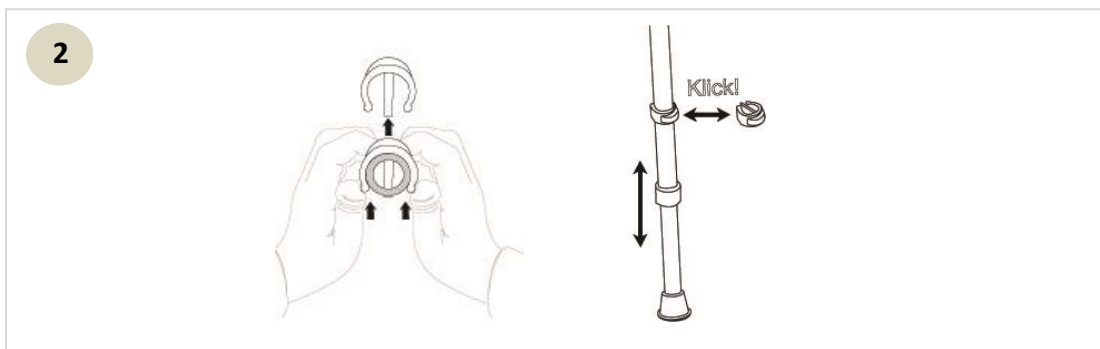

**Vedligeholdelse:** Rengøres regelmæssigt om nødvendigt (min 1 gang / måned) med sæbeopløsning, pH 5-9. Ved brugerskift skal produktet desinficeres, autoklaveres ved maksimalt 85 ° i højst 3 minutter. Alternativt kan du tørre af med 70% isopropanol.

**Genbrug:** I slutningen af produktets levetid genanvendes det som metalkrot og plastaffald. Emballagen er lavet af bølgepap og genbruges i overensstemmelse hermed.

3141676