

POTTSTOL TIL BØRN

Varenr: 138292, 138291

Tilsigtet anvendelse: En børne pottestol er en toiletindsats monteret på en højdejusterbar ramme med en aftagelig potte. Pottestolen giver en mere tryk følelse, når barnet sidder tættere på gulvet.

Kontrol ved modtagelse: Kontroller, at produktet er intakt, og at støttefodderne er monteret på alle ben. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.



Sikkerhedsforanstaltninger:

- Produktet bør ikke anvendes på nogen anden måde end beregnet.
- Pottestolen skal placeres på en plan overflade, hvor alle fire ben på stolen sidder godt fast på gulvet.
- Hvis der er tegn på, at højdejusteringen er løs, eller at produktet på anden måde er slidt, skal produktet tages ud af drift og sendes til service.
- Dupskoene skal kontrolleres regelmæssigt. Beskadigede eller slidte dupsko kan resultere i forringet greb og slid på gulve.
- Beskadigede eller slidte dupsko skal udskiftes med nye, som kan bestilles hos Danish CARE Supply.
- Brug en sele / taljebælte for at gøre det lettere for barnet at sidde oprejst.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn på pottestolen!
- Max brugervægt 50kg.

Symboler: Forklaring af symbolerne på produktet og i brugsanvisningen.



Max 50 kg

Max brugervægt 50 kg.



Kan vaskes med alkalisk sæbe, ph 5-9.



Vaskes i max 85°C i max 3 minutter.



Visuel kontrol



Produktet følger (EU) MDR 2017/745 og 2007/47/EG for medicintekniske produkter.



Varenr: 138292
HMI nr: 26721



Varenr: 138291
HMI nr: 26722

Tekniske specifikationer

Varenr: 138292 Pottstol lille	Varenr: 144972 Pottstol stor
Sædestørrelse: Dybde: 22 cm Bredde: 20 cm Højde*: 23 cm	Sædestørrelse: Dybde: 29 cm Bredde: 23 cm Højde*: 35/25 cm
Hul sæde: Dybde 16 cm Bredde: 12 cm	Hul sæde: Dybde: 18 cm Bredde: 14 cm
Justerbar højde: 19,5-28 cm	Justerbar højde: 22-30,5 cm
Max bredde stol: 38 cm	Max bredde stol: 37 cm
Maxbredde benstativ: 41 cm	Max bredde benstativ: 42 cm
Vægt 3,0 kg	Vægt 3,8 kg

Materiale: stålrør aluminium og ABS


*Højden er fra sæde til op til sikkerhedssele.

Producent:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com

Brugsanvisning

Anvendelse:

1. Juster pottestolen til den passende højde ved hjælp af trykknappen.
2. Kontroller trykknappen for højdejusteringen regelmæssigt. Hvis trykknappen er løs, skal brugen af pottestolen straks stoppes.
3. Kontroller dupskoene før brug. Beskadede eller slidte dupsko skal udskiftes med nye.
4. Placer den aftagelige potte.

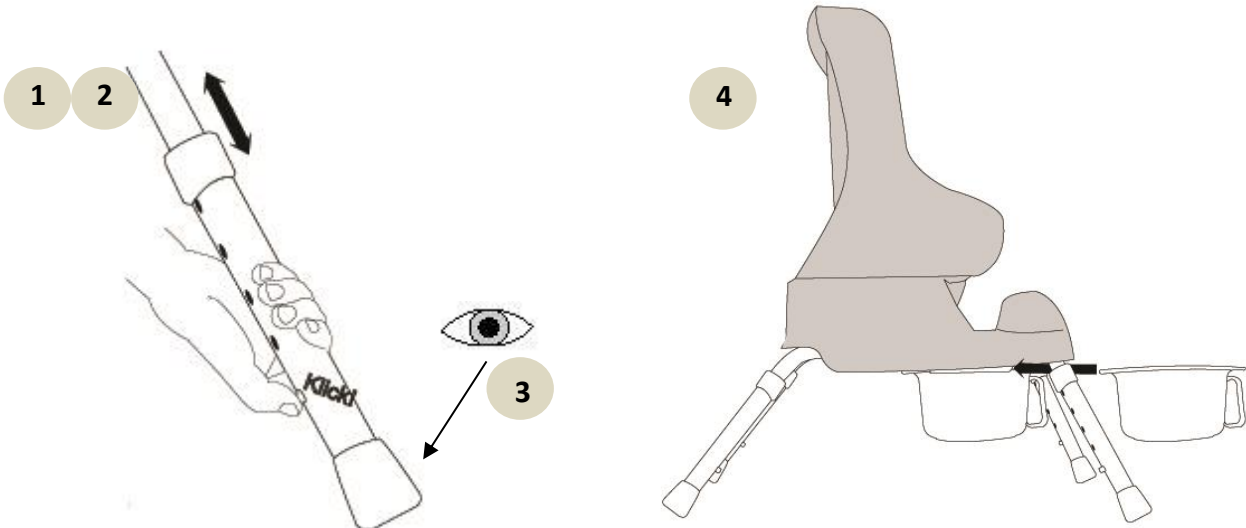

Rengøring og vedligeholdelse: Rengøres regelmæssigt om nødvendigt (min 1 gang / måned) med sæbeopløsning, pH 5-9. Ved brugerskift skal produktet desinficeres, autoklaveres ved maksimalt 85 ° i højst 3 minutter. Alternativt kan den tørres af med 70% isopropanol.

Genbrug: Når produktet er slidt, genanvendes det som metalskrot og plastaffald. Emballagen er lavet af bølgepap og genbruges i overensstemmelse hermed.



Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug, skal rapporteres til Danish CARE Supply.



Danish CARE Supply[®]

- fremtidens hjælpemidler

Danish CARE Supply

Email: DCS@danishcaresupply.dk - Tlf: 22 11 86 16

www.danishcaresupply.dk