




Brillen anvendes ved følgende instruktion:

1. Start med at vaske dine hænder
2. Vælg den hulstørrelse på brillen, der passer til tuden på øjendråberne
3. Sæt nu brillen på
4. Læg hovedet tilbage, så flasken er lodret over dit hoved
5. Hold nu øjet åbent medens du trykker let på flasken, så dråben kommer ud
6. Rengør brillen efter brug - ved håndvask, kan dog også afsprittes eller desinficeres

OBS! Brillen anvendes primært til plast flasker med medicin til øjnene. Kan ikke anvendes til øjengel.

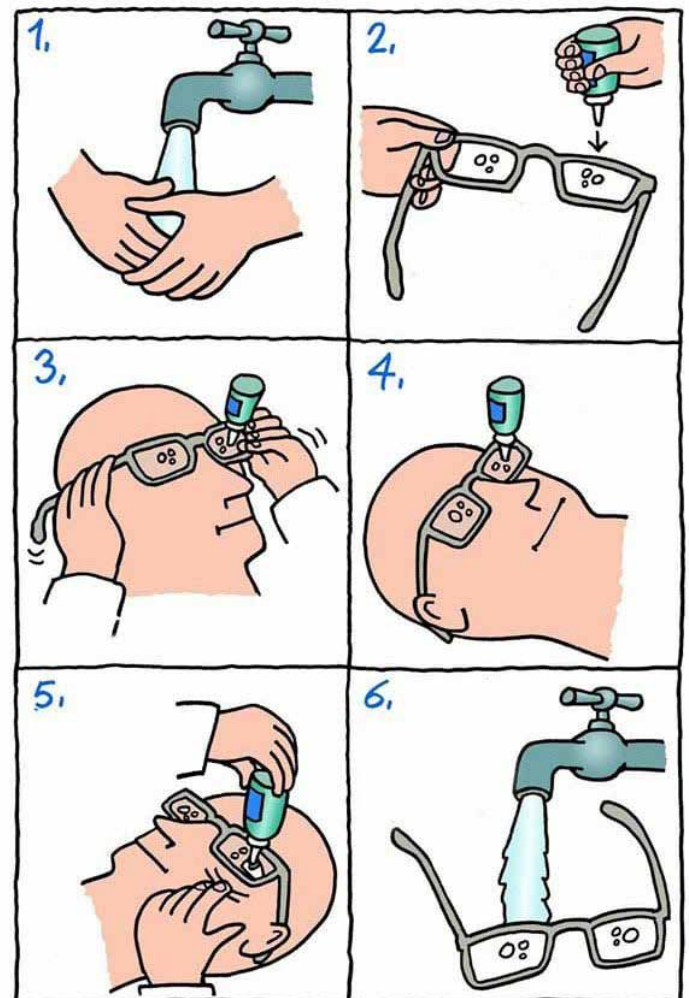

Version 25.10.2023



Danish **CARE** Supply
- fremtidens hjælpemidler