

## Introduktion:

Denne pille-alarm kan indstilles med op til 8 alarmer pr. dag på de præcise tidspunkter, som passer brugeren.

Når alarmen går i gang lyser en rød lampe og der kommer Bip-lyde, som fortsætter indtil Pille-æskens låg åbnes.



### Alarmen styres af 3 knapper:

Tryk på "MODE" 1 gang : Her indsættes tiden/uret.

TRYK på " MODE" 2-3-4-5-6-7-8-9 gange for at indstille de 8 alarmtidspunkter.

Pilleæskens alarm kan høres i 40 sekunder – hvorefter den selv stopper.

## Indstilling af uret på Pille-alarmen:

Fjern beskyttelses plastikken for at montere batteriet.

Pres på "MODE" – knappen og hold den inde indtil displayet blinker. Indstil tiden med timer og minutter.

For at bekræfte tiden tryk på MODE – knappen

## Indstilling af de 8 alarmer:

1. Tryk på "MODE" knappen indtil displayet blinker. **TRYK så 2 gange på MODE-knappen**, så "nummer 1 med en klokke" kommer frem øverst på skærmen.
2. Tryk **MODE** knappen og hold den nede indtil displayet blinker og indstil tiden på den første alarm.
3. Tryk på **MODE** knappen for at bekræfte Alarm nr. 1.

Indstilling af alarm nr. 2 – gentag processen 2 og 3.

Når de ønskede alarmer er sat ind – så lukkes pilleæskens låg.

## Slette en alarm:

For at slette en alarm, så gå til den alarm som du ønsker at slette. Tryk på **MODE** knappen og tryk på **MINUTE** knappen for at slette alarmen,

### SPECIFIKATIONER:

**Farve:** Turkis

**Antal pillerum:** 8 stk

**Mål på hvert pillerum:** 2,5 x 2,5 cm

**Størrelse på æsken:** 11 x 6 x 3 cm

**Vægt:** 40 gr

**Batteri:** Lithium batteri R2032

**Øvrigt:** Indikator for batterilevetid, der sikrer, at den aldrig løber tør for strøm, med let adgangsrum til problemfri batteriskift.

Version 18.10.2023