

Alarm-ur med op til 8 alarmer og nedtællingsfunktion:

Alarm-ur, som kan give alarmsignal (biptone) op til 8 gange om dagen på de nøjagtige tidspu
Uret husker dine alarmtider hver dag.

Alarm-uret har også en nedtællingsfunktion, hvis du ønsker at indstille andre alarmer f.eks. i l
ning eller for at huske andre ting.

Den har 3 knapper:

HOUR | MODE | MINUTE

MODE: Knappen styrer alle funktioner.

HOUR OG MINUTE: knapperne bruges kun til at indstille tidspunktet og for at annullere alarmen.



Indstilling af klokkeslæt:

1. Tryk på **MODE**-knappen, indtil du ser et lille billede af et ur-symbol i øverste højre hjørne. Tryk på og hold **MODE** nede, indtil displayet blinker og indstil derefter tiden ved at bruge **HOUR** og **MINUTE** knapperne. Bekræft klokkeslæt ved at trykke på **MODE**, og tiden er nu indstillet.
2. Vælg 12 eller 24 timers ur. Tryk på **MODE**-knappen, indtil du ser ur-symbol i øverste højre hjørne. Derefter tryk på **HOUR**-knappen for at skifte mellem 12 eller 24 timers urtilstand.

Indstilling af op til 8 alarmer:

1. Når du har indstillet tiden, skal du trykke på **MODE** for at gå til alarm 1 og et lille nummer 1 med en klokke vises øverst på skærmen.
2. Tryk og hold på **MODE**-knap, indtil displayet blinker. Indstil tidspunkt, hvor du har brug for den første alarm ved at bruge **HOUR** og **MINUTE**.
3. Tryk på **MODE**-knappen for at bekræfte at alarm 1 er indstillet. Gentag denne proces for at indstille op til 8 alarmer.

På alarmtidspunktet vil lydalarmerne bippe i cirka 30 sekunder. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe alarmen.

Indstilling af nedtællingstid:

1. Tryk på **MODE**-knap, indtil du ser et æggeur-symbol til venstre på skærmen og displayet viser 0:00.
2. Tryk på **MODE**, indtil tiden blinker og indstil den nedtællingstid, du har brug for ved hjælp af **HOUR** og **MINUTE** knapperne.
3. Tryk på **MODE**, og tiden holder op med at blinke.
4. Tryk på **MINUTE** for at starte nedtællingen og timeglasset vil blinke. Tryk på **MINUTE** for at holde pause og genstart nedtællingen.
5. Når alarmen lyder, skal du trykke på en vilkårlig knap for at stoppe den.

Annullering af en alarm:

For at slette enhver alarm; gå til den alarm, du ønsker og slet ved hjælp af **MODE**-knappen og tryk derefter på **MINUTE** knap for at slette denne alarm.

Ønsker du at slette(RESET) alle indstillinger, tager du batteriet ud i et par minutter.

