

PRODUKTBLAD/SPECIFIKATIONER:

Uni-bag universal engangs urinkolbe

Varenr.

830000

HMI nr.

52940

Anvendelse: Opmåling af urinmængde.

Uni-bag engangs urinpose:

Uni-bag universal engangs urinkolbe. Til mænd og kvinder. Uni-bag består af en tragt med et håndtag, samt en påsvejset 1500 ml pose med tilbageløbsventil.

- Ventilen forhindrer dårlig lugt og utæthed
- Anvendes til opsamling af døgnurin
- Kan anvendes af begge køn og både børn og voksne
- Indeholder minimum 30% genanvendt plast



Specifikationer:

Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Ja class 1

Opbevaring uåbnet: Beskyttet mod direkte sollys mellem 5-25 grader Celcius

Kapacitet: 1500 ml

Mål: Posemål: 18 x 32 cm - Højde med tragt: 14 cm

Bortskaffelse: Brugt: efter lokale regler. Ubrugt: som plastaffald til genanvendelse

Brugen af Uni-bag:

UNI-BAG: Viser en læsbar volumen på op til 1.500 ml. Når du læser volumen, skal du holde posen øverst = over tragtens position og lade posen hænge frit nedad. Nøjagtigheden af aflæst volumen varierer i alle urinopsamlingsposer lavet af polyethylen (PE) afhængigt af temperaturen af posens indhold på tidspunktet for aflæsningseksemplet; 37C, 28C eller stuetemperatur. Det betyder, at fejlkilder ved aflæsning af gradueringen kan være op til + - 100ml.

UNI-BAG er udstyret med en kontraventil, der forhindrer dårlig lugt og utætheder og kan med fordel bruges til at opsamle 24 timers urin. Efter afhentning klistres patientens ID på tragten og UNI-BAG sendes til Laboratoriet. På Laboratoriet vejes posen og dens vægt reduceres med 50 gram = vægt tom pose = nøjagtig daglig volumen opnås. Herefter "rokkes" posen frem og tilbage, så der opnås en homogen blanding af indholdet, herefter går man ned med en pipette i posens tragt og pipetterer det volumen, der kræves til analyse.

Version 16.12.2022



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danish Care Supply | Randers NV | Tlf.: 22 11 86 16

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk | www.danishcaresupply.dk