

MerryGrip aktive gribetænger
Hjælpemiddel til hemmet

Varenr: 120062,
120054, 120053, 120050

Gribetangen er en tang fremstillet i aluminium og plast hvilket resulterer i en lav vægt. Griberen gør hverdagen nemmere for folk, der har svært ved at tage fat i eller nå forskellige genstande, fx at bøje sig ned for at samle noget op på gulvet. Tangen er velegnet til alle hverdagens opgaver, alt fra havearbejde til en hjælpende hånd i køkkenet. Den fås i tilpassede længder til forskellige formål og er udstyret med gribegummi i kloen for øget friktion.



En aktiv model er for folk, der kan klemme håndtaget sammen og holde på trykket. Ved at trykke håndtaget sammen presses de to kløer i enderne af griberen sammen for at kunne gribe fat i genstanden. Gribegummi på begge kløer gør det nemt at fiksere og flytte genstande. Når trinnet er afsluttet, slippes håndtaget, og genstanden slippes fra kløerne. Når du ikke længere skal bruge griberen, kan du bruge snoren, der er i håndtaget, til at hænge den på en krog eller på rollatoren eller kørestolen - lige til at tage den med. Der er også under håndtaget en kant udstyret med gummi, der gør, at du kan hænge griberen fra dig på en bordkant. For enden af håndtaget er griberen udstyret med en magnet, der hjælper med at opfange metalgenstande, såsom nøgler og papirclips fra gulvet.

Varemærke	Swereco			
Varenr:	120062	120054	120053	120050
HMI nr:	48175	20204	20205	20206
Længde	40 cm	60 cm	70 cm	80 cm
Farve	Grå	Grøn	Rød	Blå
Vægt per produkt	120 g	160 g	180 g	200 g
Materiale håndtag	Polyamid (PA16)			
Material rør	Aluminium			
Tykkelse på rør, Ø	5 mm			
Rengøring	Mildt rengøringsmiddel og blød klud			
Rengøring mellem brugere	Rengøres med lunkent vand eller citronsyre eller desinfektionsmiddel med >40% isopropylalkohol (ikke gribegummi) OBS! Gribetangen kan ikke tåle varmt vand/damp over 65°C			
Tillbehør/reservedel	-			
Brugt / genbrug	Sortering efter lokale instruktioner			
Opbevaring	Stuetemperatur			
Øvrig information	Ring for yderligere information til Danish CARE Supply: Tlf: 22118616			
Garanti	1 år			



Danish CARE Supply®
- fremtidens hjælpemidler

Brugsanvisning

Varenr: 120062,
120054, 120053, 120050

Brug af produktet

- MerryGrip er beregnet og bør kun bruges som en hjælp til at flytte, nå eller gribe lettere ting med - andre anvendelsesområder anbefales ikke.
- MerryGrip kan med fordel bruges til enklere og lettere havearbejde som f.eks. opsamling af ukrudt, blade eller som plantehjælp.
- Merrygrip letter i små rum, hvor det er svært at nå med andre griberedskaber eller hænder, både med hensyn til plads og dybde.
- MerryGrip er en uvurderlig hjælp til at samle aviser, papir eller kuverter op, der er faldet på gulvet
- MerryGrip fungerer som en forlænget arm i køkkenarbejdet, såsom nedtagning af ingredienser eller andre genstande.

Sikkerhedsbestemmelser

- Produktet skal bruges til det tilsigtede formål
- Produktet må ikke bruges til at knække eller skrue
- Produktet egner sig ikke til at flytte med tunge genstande med, da der er risiko for skade på personer, hvis genstanden falder fra kløerne.
- Produktet må ikke anvendes til at flytte varme eller farlige væsker med, da der er risiko for skade på personer hvis det tabes fra kløerne.
- Produktet skal kontrolleres jævnligt, og er produktet defekt skal det kasseres.
- Regelmæssig kontrol af grebsgummi. Et knækket eller manglende grebsgummi påvirker produktets effekt og kan resultere i, at genstande glider ud af griberens kløer.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Foretag altid en visuel kontrol før brug



Aluminium og polyamid



Produkten følger (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG for medicintekniske produkter.



Vare nr 120062, 120054, 120053, 20050



Produktet må ikke flytte varme eller farlige væsker, da der er risiko for skade på brugeren, hvis genstanden slipper fra kløerne. Vær forsigtig med, at produktet ikke læner sig op ad noget eller ligger på gulvet - risiko for faldskader, når brugeren rækker ud efter griberen. Ved alvorlig produktfejl, kontakt Danish CARE Supply



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda



Danish CARE Supply®

- fremtidens hjælpemidler

Danish CARE Supply, Randers NV
www.danishcaresupply.dk · dcs@danishcaresupply.dk
Tlf: 2211 8616