

Bruges til at fastspænde toiletstole, taburetter og borde m.m. til gulvet uden at skulle bore og beskadige gulvet.

Passer til varenr. 480030+480031+480032+480040+480041.

Kan bruges på runde ben med diameter fra 19 til 25 mm.



Diameter på sugefoden: 86 mm



Max brugervægt 318 kg.

DET ER EJERENS/BRUGERENS ANSVAR AT UDFØRE EN INDLEDENDE OG REGELMÆSSIG RISIKOVURDERING. SØRG FOR, AT GULVOVERFLADER ER TØRRE OG FRI FOR SÆBE ELLER OLIEFILM. SØRG FOR, AT SUGEKOPPEN SIDDER FLADT UNDER BRUG. TEKSTUREREDE OVERFLADER ELLER EN UJÆVN SIDDESTILLING KAN FÅ SUGET TIL AT SVIGTE - FUNGERER BEDST PÅ GLATTE, IKKE-PORØSE OVERFLADER. KONTROLLER FOR STABILITET FØR BRUG. GENAKTIVER MED JÆVNE MELLEMRUM SUGET FOR OPTIMALT GREB. SØRG FOR, AT ALLE BEN ER I VATER, OG AT SUGEFODEN ER SKUBBET HELT IND PÅ BENET. SØRG FOR, AT BENET HOLDES SIKKERT INDEN I SUGEFODEN.

FJERN PLASTIKFILM FRA SUGEKOPPEN FØR BRUG. MAKSIMAL BRUGERVÆGT PR. SÆT PÅ 4 FOD. ENHVER ALVORLIG HÆNDELSE, DER OPSTÅR UNDER BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL PRODUCENTEN - KONTAKTOPLYSNINGER NEDENFOR.

RENGØRING:

AFTØRRES MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND. BRUG IKKE BLEGEMIDDEL. PH VÆRDIG 5-9.

Montagevejledning

Vælg den rigtige størrelse 1

2

3 Passer til diameter mål

3

Hvis A = er 19 mm vælg 19 mm
Hvis A = er 22 mm vælg 22 mm
Hvis A = er 25 mm vælg 25 mm

Tilpasning til ramme/ben 1

VINKEL POSITION

Sæt vinklen som toiletstøtten

Juster op til 45° for andre ben

1

Gentag for hvert ben
Tjek alle ben er korrekt sat i

2

Sørg for at fodens hældning er med samme vinkel som benet

Aktivering af sugefunktion 1

Sikre at overfladen er flad, glat, ren og tør

2

Tryk ned centralt

Med uret = lås
Mod uret = løsn

3

Gentag for hvert ben

4

TJEK STABILITETEN

Version 28.11.2023



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danish Care Supply | Randers NV | Tlf.: 22 11 86 16

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk | www.danishcaresupply.dk