








Drejbar badestol  
Hjælpemidler i hjemmet • Bad & Bruser • Stole & taburetter

Varenr: 134044

Brusestolen er beregnet til at blive brugt som et hjælpemiddel ved brusebad og vask for bevægelseshæmmede. Stolen er fremstillet til at blive brugt i våde områder.

Navn	Drejbar Badestol
Varenummer	134044 - HMI nr 26411
Sædebredde x dybde	B: 43 x D: 40 cm
Højde	45-55 cm
Vægt	6,8 kg
Materiale	Stålrør, PE (sæde), TPE (dupsko) Stålrør, PE (sæde), TPE (støttefødder)
Maksimal brugervægt	Maksimal brugervægt på 130 kg
Tilbehør	Art nr. 142121 blødt sæde Kulan, fuld sæde Art nr. 142122 blødt sæde Kulan, intimsæde (kun til intimt underlag) Art nr 142125 blød ryg Kuglen
Reserve dele	Art nr. 120690 støttefod Art nr 142128 sæde Kulan, fuld sæde Art nr. 142129 sæde Kulan, intim Art nr 14420213 clips 25 mm
Teknisk levetid	5 år forudsat at der udføres regelmæssig kontrol og service
Genbrug	Genbrug af metal og plast. Sorteret efter lokale instruktioner
Opbevaring	Stuetemperatur
Andre oplysninger	Produkttræning/information kan leveres af Swereco efter anmodning



<b>Symboler:</b>		<b>Brugermanual</b>
	Produktets lotnummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktet bør ikke bruges på en anden måde, end det er beregnet</li> <li>• Stolen er ikke beregnet til at blive brugt i et badekar</li> <li>• Stolen skal placeres på en plan overflade, hvor alle fire stoleben står fast mod gulvet</li> <li>• Stolen må ikke vinkles sådan, at den kun står på to ben, når brugeren sidder i den. Den maksimale brugervægt beregnes med alle fire ben på gulvet.</li> <li>• Stolen må ikke flyttes med brugeren siddende i den.</li> <li>• Dupskoene bør kontrolleres regelmæssigt. Beskadigede eller slidte dupsko kan betyde et reduceret greb.</li> <li>• Beskadigede eller slidte dupsko skal udskiftes med nye.</li> <li>• Før brug skal du sikre dig, at højdejusteringsklemmen er helt i indgreb.</li> <li>• Når du skifter clips, skal du sørge for, at det er den rigtige model (forskellige størrelser er tilgængelige).</li> <li>• Hvis der er tegn på, at højdejusteringen er løs, eller at produktet på anden måde er slidt, bør produktet tages ud af brug og sendes til service.</li> <li>• Blød ryg art nr. 142125, kan bruges til brugere med god bagagerumsstabilitet. Der skal forudgås en risikovurdering af en kompetent ordinator.</li> </ul> <p>Produktet skal rengøres regelmæssigt og evt. med sæbeopløsning, ph 5-9. Produktet kan også tørres med 70% isopropanol. Produktet må IKKE rengøres med ethanol. I tilfælde af alvorlige produktfejl/ulykker kontaktes leverandøren.</p>
	Produktets udløbsdato (5 års levetid)	
	Produktets artikelnummer (Swereco): 142180, 142181	
	Produktet er et medicinsk udstyr	
	Produktet er CE-mærket i henhold til MDR (EU) direktiv 2017/745 klasse 1	
	Se brugermanualen	
	Producent: Swereco AB Vagnvågen 4 364 42 Lenhovda	
 SRN SE-MF-000033314		<b>Rekonditioneringsvejledning</b> Ved istandsættelse skal produktet kontrolleres, og slidte eller beskadigede dele skal udskiftes. Kan desinficeres i dertil beregnet udstyr ved 85°C i mindst 3 minutter. Produktet skal istandsættes mellem hver bruger eller oftere om nødvendigt.

## Brusestol

Hjælpemidler i hjemmet • Bad & Bruser • Stole & taburetter

Varenr: 134044

### Brug:

- 1) Monter sædet på stolen ved at trykke det på stålstellet.
- 2) For at justere højden, skal du skubbe clipsene af det ene ben, justere til den korrekte højde og derefter skubbe clipsen tilbage. Kontroller, at clipsen er trykket ordentligt ind før brug. Hvis en gammel clips udskiftes med en ny, skal du kontrollere, at den har den rigtige størrelse (flere størrelser er tilgængelige).
- 3) Stolen låser automatisk hver 90. grader med en lås, der let frigøres ved at trykke ned på det fjederbelastede håndtag. Håndtaget kan nemt flyttes fra højre til venstre side.
- 4) Tjek dupskoene før brug. Beskadigede eller slidte dupsko skal udskiftes med nye.

