



Danish CARE Supply

-fremtidens hjælpemidler

# MAXI-SLIDE - kort op til knæet

Effektivt glidestykke beregnet til på- og afgang af korte kompressionsstrømper med åben og lukket tå. Det er designet til at kunne nå hele vejen rundet om benets læg og op til knæet. Maxi Slide giver en ekstra god aflastning for borgeren og for hjælperen. Bemærk venligst at der er syet lufthuller i siderne af Maxi sliden, sådan at luften kan komme ud af glidestykket.

SÆT X	HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Lægomkreds	Mål på slide	
					Bredde	Længde
	88148	3013	MAXI - SLIDE - KORT - MEDIUM	Op til 45 cm	41cm	85 cm
	88149	3009	MAXI - SLIDE - KORT - BRED	Over 45 cm	51cm	85 cm



[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)

Danmarks største udvalg af strømpe på- og afgangere




## > Påtagning



**1.** Sæt foden på den bløde side af glidestykket, så der er et godt stykke af slippen foran foden.



**2.** Fastgør velcrobåndet rundt om læggen.

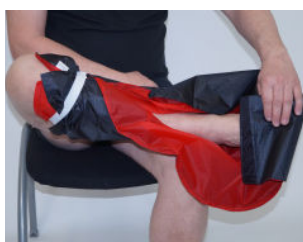

**3.** Buk dig ned eller sæt benet over kors og fold slippen op over tæerne.



**4.** Tag handsker på og før med flad hånd strømpen rundt om hælen.



**5.** Træk strømpen på plads på benet.



**Rengøring:** Vaskes i hånden ved max 30° C.  
**Materiale:** Bød spilerdug



Youtube  
Video





**6.** Tag velcrobåndet af.



**7.** Træk slippen ud af strømpen.

## > Aftagning



**1.** Start med at sættet benet ind i sliden som vist på billedet.



**2.** Sæt nu velcrobåndet "lidt" løst rundt lige ovenfor hælen.



**3.** Tag handsker på, og skub med flade hænder strømpen rundt om hælen, og træk strømpen det sidste stykke af foden.

## > Hvis det kniber til på- og aftagning



Vi kan anbefale at anvende en blå friktionsplade, hvis det kniber med at få strømpen rundt om hælen i på- og/eller aftagning af kompressionsstrømper.





Vi har markedets største sortiment og know-how indenfor på- og aftagning af kompressionsstrømper. Vi hjælper dig gerne med at udvælge det rette hjælpemiddel, som passer bedst til dine behov.

Kontakt os på telefon: 221 18616 eller på mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)


#### > På- og aftagere



#### > Doff N' Donner



#### > Glidestykker - på/af

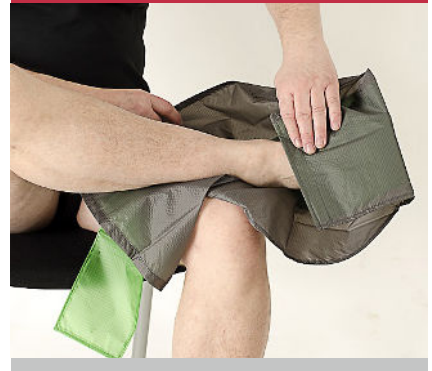

#### > Elektrisk aftager



#### > Handsker



#### > Spilerdug



Få mere inspiration på vores webshop [www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk) eller besøg gerne vores fysiske butik i Randers på Alsikevej 12, 8920 Randers NV. Vi har et stort program indenfor småhjælpemidler, som kan gøre hverdagen lidt lettere.

**På gensyn...**

### Danish CARE Supply

Alsikevej 8

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)

[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)



Følg os på  
**facebook**

[facebook.com/danishcaresupply](https://facebook.com/danishcaresupply)