



Inkontinens sengeunderlag med glid og sidestykker/håndtag – 90x230 cm

Sengeunderlaget har et vandtæt barrierelag i bunden og en kerne af stærkt absorberende materiale. Sengeunderlaget har en underside af lav friktions materiale samt et håndtag/sidestykker, der gør vendingen lettere.


Underlagets overfalde er lavet af børstet polyester, hvilket gør at overfladen føles tør, selv efter lækage.

Beskyttelsesunderlaget har sidestykker, som kan fastgøre lagnet til sengen/madrassen. Det er lamineret, hvilket gør det meget stærkt og resulterer i en glat overflade uden risiko for indvendige folder i produktet.



Brugsanvisning: Vask beskyttelsesunderlaget inden brug for at aktivere absorberingsevnen.

Placér beskyttelsesunderlaget i sengen med glidefladen vendt ned mod madrassen. Fastgør underlaget med sidestykkerne rundt om madrassen. Tag et fast greb om håndtagene, når sengeunderlaget anvendes som sengelagen. Bemærk venligst, at produktet ikke er beregnet til at løfte personer. Sørg for, at beskyttelseslagnet er tilpasset sengens bredde.

Varenavn	Inkontinens sengeunderlag med glid og sidestykker/håndtag – 90x230 cm
Varemærke	Absorba
Varenr.	310047
HMI nr.	114161
Absorberingskapacitet SS 8760033:2015	2476 ml
Samlet areal, LxB	90x230 cm
Overflade / glidende overflade, LxB	90x110 cm
Håndtag	Kraftig nylon
Overflademateriale	100% Børstet Polyester
Underlagsmateriale, glidende overflade	100% Polyester
Sidestykke	65 % Polyester, 35 % Bomuld
Barrierelag	Polyuretan
Absorberingsmateriale	65% Polyester, 35% Rayon
Rengøring	
Antal vaske	Ca. 200 – ikke industrivask
Bortskaffelse/sortering	Brændbart affald, sorteres efter lokale anvisninger
Opbevaring	Stuetemperatur, ikke i sollys
Øvrig information	Produktet indeholder ikke PVC eller Latex



Produktet overholder EU's grundlæggende sundheds-, miljø- og sikkerhedskrav



OEKO-TEX® betyder at produkterne er fremstillet på en miljøvenlig måde



Sørg for, at syninger og materialer er komplette og ubeskadiget. Ved tegn på slid skal produktet kasseres.
Bemærk, at der stadig er risiko for at glide ud, efter hver bevægelse / position, skal der træffes en risikovurdering med udgangspunkt i andre sikkerhedsforanstaltninger!
Læg **altid** sidestykkerne indunder madrassen.
Bemærk! Produktet er ikke beregnet til at løfte personer.
Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med genstande og enheder, der udsender høj varme.