




Inkontinens sengeunderlag med sidestykker – 80 x 190 cm.

Beskyttelseslaget har en vandtæt barrierelag i bunden og en kerne af stærkt absorberende materiale. Lagnets overflade består hovedsageligt af bomuld, som føles behagelig. Beskyttelseslaget er lamineret, hvilket gør det meget kraftigt, og resulterer i en glat overflade uden risiko for indvendige folder. Beskyttelseslaget har sidestykker, som kan fastgøre lagnet til sengen/madrassen.



Brugsanvisning: Vask beskyttelseslaget før brug for at aktivere absorberingsevnen. Placér beskyttelseslaget på sengen med den grønne side mod madrassen. Fastgør beskyttelseslaget medvingerne/sidestykkerne rundt om madrassen. Tag et fast greb om den tykke og laminerede del, når beskyttelseslaget anvendes som sengelagen. Sørg for, at beskyttelseslaget er tilpasset sengens bredde.

Varenavn	Inkontinens sengeunderlag med sidestykker - 80x190 cm
Passer til sengebredde	80 x 105 cm
Varenr.	310090
Antal produkter, stk.	1
Vægt	400 g
Samlet areal	L: 85 x B: 90 cm
Overflade, LxB	L: 85 x B: 190 cm
Absorberingskapacitet SS 8760033:2015	1537 ml
Overflademateriale	80% Bomuld, 20% Polyester
Underlagsmateriale	100% Polyester
Sidestykke	50% Polyester, 50% Bomuld
Barrierelag	Polyuretan
Absorberingsmateriale	35% Rayon, 65% Polyester
Rengøring	 Ved afføring eller blodpletter skal liggeunderlaget skylles i koldt vand hurtigst muligt.
Antal vaske	Ca. 450 (normal husholdningsvask)
Bortskaffelse/sortering	Brændbart affald, sorteres efter lokale anvisninger
Opbevaring	Stuetemperatur, ikke i sollys
Øvrig information	Produktet indeholder ikke PVC



Produktet overholder EU's grundlæggende sundheds-, miljø- og sikkerhedskrav



OEKO-TEX® betyder at produkterne er fremstillet på en miljøvenlig måde



Sørg for, at syninger og materialer er komplette og ubeskadiget. Ved tegn på slid skal produktet kasseres. Bemærk, at der stadig er risiko for at glide ud, efter hver bevægelse / position, skal der træffes en risikovurdering med udgangspunkt i andre sikkerhedsforanstaltninger! Læg **altid** sidestykkerne indunder madrassen. **Bemærk!** Produktet er ikke beregnet til at løfte personer. Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med genstande og enheder, der udsender høj varme.