



Instruktionsguide til DressBuddy Aftager på hjul

Beregnet til afgang af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

Henvender sig til borgere med nedsat kraft i benene, og borgere med hel eller delvis lammeelse i benene.

Det er muligt at tage kompressionsstrømperne af med én hånd.

Vi anbefaler at lægge et lille tæppe eller et par friktionsplader under, når man anvender DressBuddy aftager på hjul på et træ- eller parketgulv.



HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Person mål		Stativ mål	
			Personhøjde i cm	Lægomkreds i cm	Bredde i cm	Længde i cm
77971	2050	AFTAGER MED HJUL - MELLEM	Op til 170	Op til 40	16	60
77972	2051	AFTAGER MED HJUL - LANG	Over 170	Op til 40	16	68
77973	2052	AFTAGER MED HJUL - MELLEM OG BRED	Op til 170	Over 40	19	60
77974	2053	AFTAGER MED HJUL - LANG OG BRED	Over 170	Over 40	19	68

Materiale: Rustfri stål.

Rengøring: DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask.



Youtube
video



HMI-Basen
manual



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere

Aftagning



1. Sæt de blå kugler på DressBuddy'en lige indenfor kantbåndet bag på læggen.



2. Skub DressBuddy'en ned langs benet.



3. Skub DressBuddy'en fremad, så hjulene kører over gulvet.



4. Fortsæt med at skubbe indtil strømpen kommer helt af.





1. Hvis borgeren har sårbar hud --> Lav en fold på strømpen ved aftagningen, så kuglerne ikke kommer i berøring med huden.



2. Hvis borgeren har svært ved at få foden ud af strømpen--> Det skyldes ofte at de blå kugler sidder for langt nede i strømpen eller for langt fremme i strømpen og derved mindskes elasticiteten. Husk at de blå kugler skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet og bagpå benet (billedet).



3. Hvis borger ikke har kræfter til at skubbe strømpen af --> Anvend andet glide stykke eksempelvis Slip åben tå, Easy off.



4. Elektrisk aftager ORT.O.MATE.
Til borgere som ikke kan blive selvhjulpne i aftagning af kompressionsstrømper ved brug af andre typer hjælpemidler.

Hvem er vi?



Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler til private borgere, virksomheder og kommuner.

Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og afklædning, køkkenet, spisning, personlig pleje, badet, toiletbesøg, dagligstuen og sengen.

Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres arbejde med borgerne.

Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, ved telefonisk kontakt eller i vores fysiske butik.

Vi står klar med gode råd og vejledning i brugen af alle vores hjælpemidler.



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danish CARE Supply

Alsikevej 8

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply