



Glidelagen med glidedel - hvid


Glidelagnet har en glidende overflade med lav friktion. Den lave friktion gør det lettere for borgerne at bevæge sig i sengen uden mange kræfter. Borgeren, som stadig af forskellige årsager har svært ved at ændre deres position eller flytte sig fra side til side, er glidelagnet en uvurderlig hjælp. Det lettere samtidig også hjælperen, når de skal dreje eller bevæge den sengeliggende borger og aflaster hjælperens skuldre og ryg.



Produktnyhed!

Glidelagnet er specielt vævet for at give øget stabilitet (længere holdbarhed). Glidelagnet kan derfor vaskes ved 90 grader ca. 200 gange uden at stoffet påvirkes.


OBS! Glidelagnet er indlejret med ca. 10-12 cm mellem glidelagnet og kanten af madrassen. Dette er markeret med en langsgående syning, som er glidestop (slip-stop), der forhindrer borgeren i at glide ud af sengen, samt

Varenavn	Glidelagen med glidedel - hvid		
Varemærke	Qorpus Vita		
Varenr.	310068	310070	310072
Samlet areal LxB	100x200 cm	140x200 cm	200x200 cm
Glidefladen LxB	100x60 cm	140x60 cm	200x60 cm
Sengebredde	80-90 cm		
Maks personvægt	220 kg		
Farve	Hvid		
Antal produkter, stk.	1		
Glideflademateriale	Polyester		
Sengelagensmateriale	Polyester / bomuld		
Rengøring	 Ved afføring eller blodpletter skal glidelagnet skylles i koldt vand så hurtigt som muligt		
Antal vaske	Ca. 200 (husholdningsvask, ikke industrivask)		
Bortskaffelse / sortering	Brændbart affald, sorteres efter lokale anvisninger		
Opbevaring	Stuetemperatur		
Øvrig information	Produktet indeholder ikke PVC		




Instruktioner/korte oplysninger

- Læg glidelagnet i sengen med glidefladen vendt opad. Glidelagnet fastgøres til sengen ved hjælp af vingerne og er indlejret med ca. 10-12 cm glidestop (slip-stop) på begge sider af sengekanten.
- Produkterne er markeret med hvilken side, som skal indlejres i sengen for at sikre den korrekte funktion og sikkerhed.

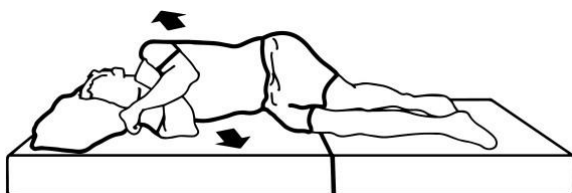

Glidelagnet skal placeres i sengen efter formålet, da størrelsen på glidelagnet afhænger af borgerens behov.

OBS! Glidelagnet er markeret med glideretninger, samt hvilke sider af produktet, som skal være indlejret i sengen for at få den korrekte funktion og sikkerhed.

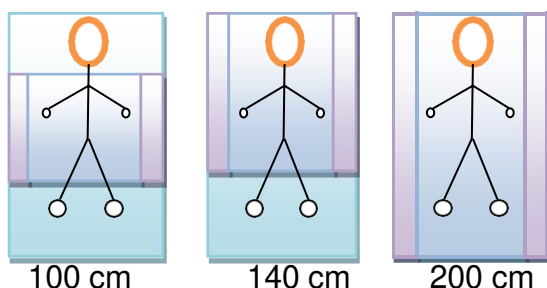

Sørg for, at syninger og materialer er komplette og ubeskadiget. Ved tegn på slid skal produktet kasseres. Vær opmærksom på, at der stadig er risiko for slitage. Bemærk, at der stadig er risiko for at glide ud, efter hver bevægelse / position, skal der træffes en risikovurdering med udgangspunkt i andre sikkerhedsforanstaltninger! Produktet er ikke beregnet til at løfte personer. Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med genstande og enheder, der udsender høj varme

OBS! Produktet må ikke bruges til at løfte borgeren. Maks. personvægt 220 kg.



Produktet overholder EU's grundlæggende sundheds-, miljø- og



OEKO-TEX® betyder at produkterne er fremstillet på en miljøvenlig måde

