



Danish **CARE** Supply®


- fremtidens hjælpemidler

DressOn® – Jakke på- og aftager

Monteret på væg

HMI nr. 80938

Varenr. 5010

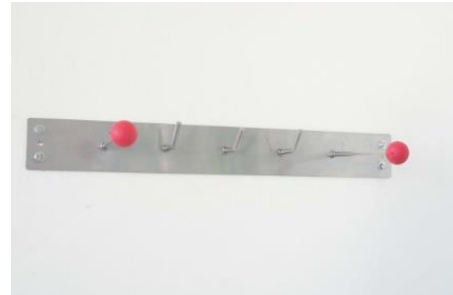

Specifikationer:

- Bredde: 64 cm.
- Højde: 7,8 cm.
- Længde på pind med de røde kugler: 25 cm
- Materiale: Rustfrit stål



HMI-Basen



YouTube-video

Montering:



Højde:

Ca. 5-10 cm. Over albuen – eller efter behov.



Fastgørelse:

2 huller i hver side- det øverste og nederste hul. Der medfølger ravpluks og montage skruer.



Bredde:

Bredde kan justeres efter behov. Der er 4 huller, hvor stangen med de røde kugler kan flyttes



Klar til brug

Anvendelse:



Jakken sættes på de røde kugler



Tag den arm med de svageste ressourcer først



Tag den første del af jakken på med den raske arm



Nu kan jakken tages helt på