



# Instruktionsguide til Elektronisk aftager - Ort. O. Mate

Den henvender sig til borgere, som ønsker at blive eller forblive selvhjulpne i forhold til aftagning af kompressionsstrømper.

Kan anvendes af borgere, som kan nå til strømpens kantbånd. Ort.O.Mate kan anvendes både siddende og liggende. Til alle typer kompressionsstrømper, korte, lange og åben og lukket tå (dog ikke strømpebukser).



HMI-nr.	Varenr.	Varetekst
72551	3070	Elektrisk aftager - Ort.O.Mate

**Tekniske specifikationer:** 230V / 50Hz / 1,4A.

**Rengøring:** De røde kugler og metal kan afsprittes eller håndvask.



Youtube  
Video



HMI-Basen  
Manual



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler

*Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere*

# Aftagning



**1.** Kuglerne sættes bag på læggen lige indenfor strømpens kantbånd.



**2.** Hvis der er tale om sart hud, kan der med fordel laves en fold på strømpen således, at kuglerne ikke kommer i berøring med huden.



**3.** Placér fjernbetjening på modsatte knæ – så den hele tiden peger ned mod maskinen. Tryk på den røde knap for at starte maskinen. (Når den røde knap slippes stopper maskinen straks). Løft evt. benet lidt op, når der trykkes på den røde knap.



**4.** Strømpen trækkes nu stille og roligt af benet og rundt om hælen og til sidst af foden.



# Aftagning med glidestykke



**1.** Slippen sættes på benet som vist på billedet.



**2.** Sæt velcrobåndet rundt om benet lige over hælen og fold slippen ned.



**3.** Sæt kuglerne bag på læggen lige indenfor kantbåndet.



**4.** Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen og træk strømpen af.





## Anvendelse og anbefalinger

- Ort.O.Mate monteres i borgerens hjem lige ovenover fodlisten.
- Afstanden fra borgerens ben til Ort.O.Mate er ca. 2 store skridt (2 meter).
- Hvis der er tale om lammelser anbefales det at lægge noget blødt fx en pude på gulvet, så foden "lander" blødt, når strømpen trækkes af foden.

## Hvis der opleves vanskeligheder i forbindelse med brugen af maskinen:

### Maskinens placering og montering:

- Er maskinen placeret korrekt lige over fodlisten?
- Sidder borger ca to store skridt væk fra maskinen?
- Er strømkablet sat korrekt i?
- Er der lys i fjernbetjeningen, når man trykker på den? (virker batteriet?)
- Er der gået en sikring? Den sidder på siden af maskinen ved strømkablet inde i den lille sorte plastikskruer. Skruen drejes venstre om, når den skal ud.
- Har strømpen svært ved at komme ned om hælen? "Hakker" maskinen i forbindelse med aftagning af strømpen?
  - 1) Borger kan prøve at flytte sig lidt længere væk fra maskinen, hvilket giver et større træk fra maskinen.
  - 2) Prøve med et bredere beslag, når læggen er over 40 cm i omkreds.
  - 3) Prøve at sætte et glidestykke på foden, hvis dette er muligt.

### Borgers betjening af maskinen:

- Peger fjernbetjeningen med føleren ned mod maskinen?
- Er fjernbetjeningen placeret på modsatte knæ i forhold til det ben, hvor strømpen skal af?
- Sidder kuglerne korrekt placeret øverst og bagpå læggen lige indenfor kantbåndet?
- Har borger svært ved at få placeret begge de røde kugler indenfor kantbåndet?
  - Der findes alternativt beslag, kontakt os gerne for yderligere information.

## Danish CARE Supply

Alsikevej 8

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)

[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)



Følg os på

**facebook**

[facebook.com/danishcaresupply](https://facebook.com/danishcaresupply)