



Strømpeaftager til arm

Ort.O.Arm

Varenr.: 3090 - HMI nr.: 74619



Ort. O. Arm er en enkelt og effektiv metode, som anvendes til aftagning af kompressionsstrømper på arm.


> Aftagning med Ort. O. Arm



1. Sæt stroppen på dørhåndtaget.



2. Sæt mindst én af kuglerne indenfor kantbåndet bagpå armen.

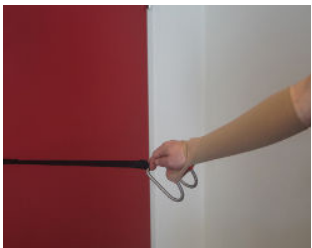

3. Bevæg dig stille og roligt væk fra døren, så strømper glider af.



Rengøring: Autoklave eller håndvaskes ved max 30° C.






Vi har markedets største sortiment og know-how indenfor på- og aftagning af kompressionsstrømper. Vi hjælper dig gerne med at udvælge det rette hjælpemiddel, som passer bedst til dine behov.

Kontakt os på telefon: 2211 8616 eller på mail: dcs@danishcaresupply.dk


➤ På- og aftagere



➤ Doff N' Donner

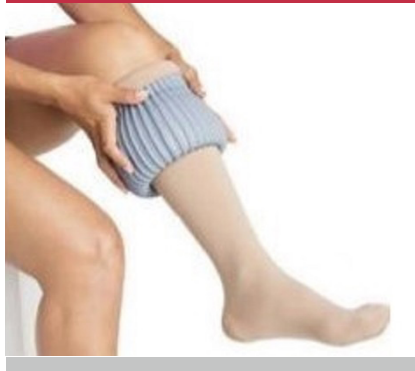

➤ Glidestykker - på/af

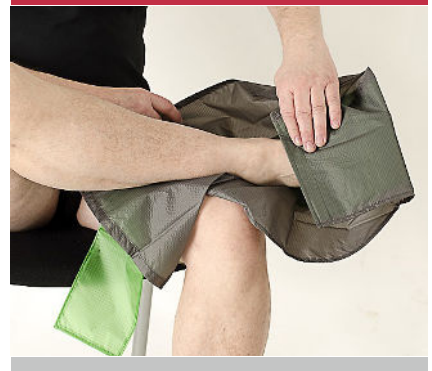

➤ Elektrisk aftager



➤ Handsker



➤ Spilerdug



Få mere inspiration på vores webshop www.danishcaresupply.dk eller besøg gerne vores fysiske butik i Randers på Agerskallet 1 – 8920 Randers NV. Vi har et stort program indenfor småhjælpemidler, som kan gøre hverdagen lidt lettere.

På gensyn...

Danish CARE Supply

Alsikevej 8

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på
facebook

facebook.com/danishcaresupply