



SLIP-ARM

Beregnet til på- og aftagning af støtte- og kompressionsstrømper på arm. Vi anbefaler brug af handsker, som er beregnet til kompressionsstrømper.

SÆT X	HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Armlængde	Armomkreds
	72543	3030	SLIP ARM - PÅ/AF - KORT	Op til 45 cm	Op til 38 cm
	72544	3031	SLIP ARM - PÅ/AF - MELLEML	46-55 cm	Op til 38 cm
	72545	3032	SLIP ARM - PÅ/AF - LANG	56-65 cm	Op til 38 cm
	110862	4010	SLIP ARM - PÅ/AF - KORT - BRED	Op til 45 cm	39-50 cm
	110863	4011	SLIP ARM - PÅ/AF - MELLEML - BRED	46-55 cm	39-50 cm
	110864	4012	SLIP ARM - PÅ/AF - LANG - BRED	56-65 cm	39-50 cm
	109823	4013	SLIP ARM - PÅ/AF - LANG - XXL	56-65 cm	51-56 cm




www.danishcaresupply.dk

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere



> Påtagning

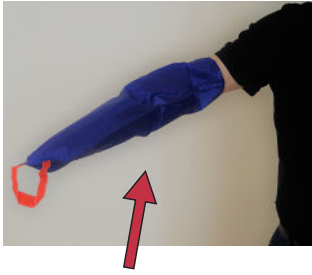

1. Træk slippen på armen.



2. Træk strømpen på slippen.



3. Tag handsker på og træk strømpen helt op på armen.



4. Sæt løkken fast i dørhåndtaget.



5. Hold fast i strømpen samtidig med, at slippen trækkes af.



> Aftagning



1. Tag fat i kantbåndet og træk strømpen af.


> Aftagning med Ort. O. Arm



1. Sæt stroppen på dørhåndtaget.



2. Sæt mindst én af kuglerne indenfor kantbåndet bagpå armen.

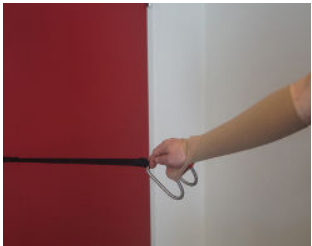

3. Bevæg dig stille og roligt væk fra døren, så strømpen glider af.



Rengøring: Vaskes i hånden ved max 30° C.

Materiale: Spilderdug



Youtube
Video






Vi har markedets største sortiment og know-how indenfor på- og aftagning af kompressionsstrømper. Vi hjælper dig gerne med at udvælge det rette hjælpemiddel, som passer bedst til dine behov.

Kontakt os på telefon: 2211 8616 eller på mail: dcs@danishcaresupply.dk


➤ På- og aftagere



➤ Doff N' Donner

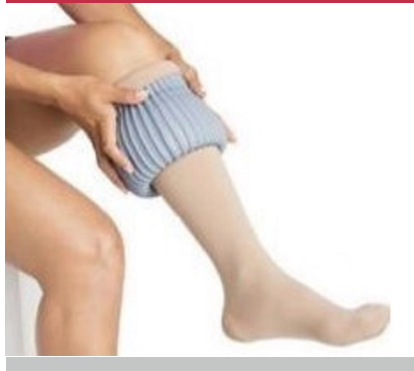

➤ Glidestykker - på/af

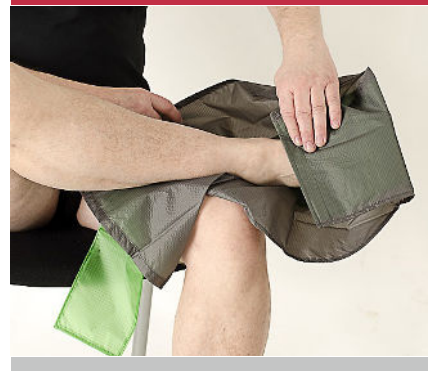

➤ Elektrisk aftager



➤ Handsker



➤ Spilerdug



Få mere inspiration på vores webshop www.danishcaresupply.dk eller besøg gerne vores fysiske butik i Randers. Vi har et stort program indenfor småhjælpemidler, som kan gøre hverdagen lidt lettere.

På gensyn...

Danish CARE Supply

Alsikevej 8

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på
facebook

facebook.com/danishcaresupply