



SLIP-PERFECT



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler

Strømpe - på og aftager - One Size

Slip-Perfect er et unikt glidestykke, som har de bedste glide egenskaber i på – og aftagning af alle typer kompressionsstrømper. Det kan anvendes til korte og lange strømper, strømper med åben og lukket tå og strømper i alle 4 kompressionsklasser.

Glidestykket er fremstillet i blød spilerdug, som går rundt om foden og samtidig giver et rigtig godt glide op ad læggen. Det bløde materiale beskytter huden, så friktionen mindskes. Slippen trækkes altid ud oppe ved strømpekanten – nemt og enkelt. Du kan finde en instruktionsvideo for Slip-Perfect på vores hjemmeside.

HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Bredde i cm	Længde i cm
103105	3017	SLIP-PERFECT one size	19	96



www.danishcaresupply.dk

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere



> Påtagning



1. Sæt benet over kors og lav en fold på slippen, så tæerne er dækket.



2. Sæt strømpen på foden.



3. Tag handsker på og gnid med flad hånd strømpen op omkring hælen og træk strømpen på.



4. Træk slippen ud af strømpen oppe ved knæet.



Rengøring: Vaskes i hånden ved max 30° C.

Materiale: Blød spilderdug



Youtube
Video





> Aftagning



1. Sæt benet ned i slippen, så den sidder rundt om benet.



2. Fastgør den medfølgende velcro, så den sidder lige over hælen og pas på med, at velcroen ikke sidder alt for stramt.



3. Fold strømpekanten ud over glidestykket. Vær opmærksom på, at glidestykket bliver der, når du trækker strømpen ned om hælen.



4. Tag handsker på, og gnid nu med flad hånd strømpen af hælen og træk strømpen af.

> Hvis det kniber med på- og aftagning?



Vi kan anbefale at anvende en blå friktionsplade, hvis det kniber med at få strømpen rundt om hælen i på- og/eller aftagning af kompressionsstrømper.





Vi har markedets største sortiment og know-how indenfor på- og aftagning af kompressionsstrømper. Vi hjælper dig gerne med at udvælge det rette hjælpemiddel, som passer bedst til dine behov.

Kontakt os på telefon: 221 1 8616 eller på mail: dcs@danishcaresupply.dk

➤ På- og aftagere



➤ Doff N' Donner



➤ Glidestykker - på/af



➤ Elektrisk aftager



➤ Handsker



➤ Spilerdug



Få mere inspiration på vores webshop www.danishcaresupply.dk eller besøg gerne vores fysiske butik i Randers på Agerskallet 1 – 8920 Randers NV. Vi har et stort program indenfor småhjælpemidler, som kan gøre hverdagen lidt lettere.

På gensyn...

Danish CARE Supply

Alsikevej 8

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på
facebook

facebook.com/danishcaresupply