


Instruktionsguide til

DressBuddy stående

Beregnet til på- og afgang af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

Henvender sig til borgere der har nedsat funktion i skuldre, arme eller hænder, samt borgere der ikke kan bukke sig frem og nå ned til sine fødder.

I sættet medfølger friktionsplade og glidestykke som tilbehør.

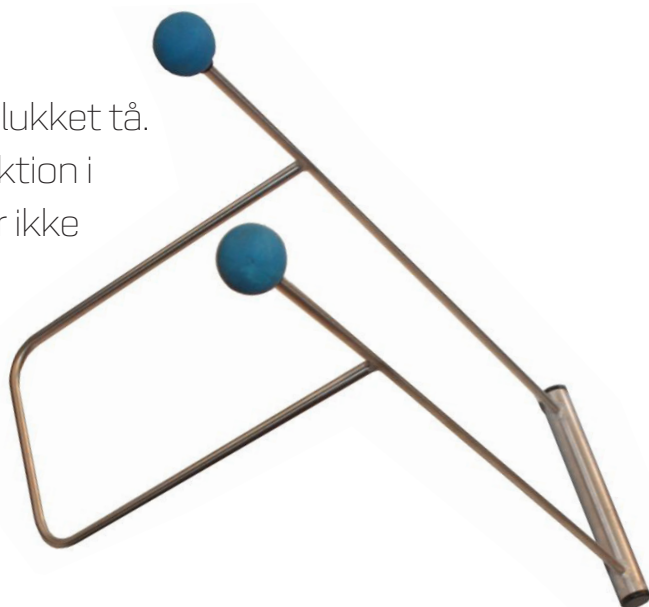

			Person mål
HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Lægomkreds i cm
72525	1007	SÆT - 3 dele - STÅENDE - MELLEM	Op til 40
77970	1008	SÆT - 3 dele - STÅENDE - BRED	Over 40
72622	2021	ENKELT - STÅENDE - MELLEM	Op til 40
79782	2026	ENKELT - STÅENDE - BRED	Over 40

Materiale: Rustfri stål.

Rengøring: DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask. Slip-Fod og friktionsplade kan vaskes i hånden ved max 30° C.



Youtube
Video



HMI-Basen
Manual



Danish **CARE** Supply

-fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere

Påtagning



1. Placér friktionspladen på gulvet som vist på billedet.




6. Gnid hælen med små korte ryk på friktionspladen.



2. Læg DressBuddy'en på lårene. Sæt strømpe på de blå kugler lige indenfor kantbåndet.



7. Tag strømpen af kuglerne og træk strømpen op.

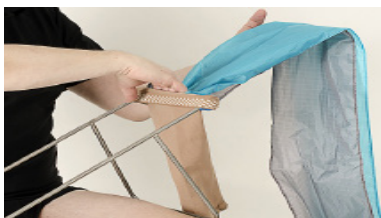

3. Put slippen ned i strømpen.



8. Træk slippen ud.



4. Sæt DressBuddy'en på gulvet.



5. Før foden ned i strømpen og trød så langt ned i strømpen, til foden kommer ned på friktionspladen.





1. Placér friktionspladen foran fødderne, så hælen kommer til at hvile naturligt på friktionspladen



2. Sæt de blå kugler lige indenfor kantbåndet bag på læggen.



3. Træk benet bagud, så strømpen trækkes ned til anklen.



4. Gnid hælen mod friktionspladen med små korte ryk, indtil strømpen glider af.

Hvem er vi?

Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler til private borgere, virksomheder og kommuner.

Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og afklædning, køkkenet, spisning, personlig pleje, badet, toiletbesøg, dagligstuen og sengen. Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres arbejde med borgerne.

Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, ved telefonisk kontakt eller i vores fysiske butik.

Vi står klar med gode råd og vejledning i brugen af alle vores hjælpemidler.






Tips og tricks

Påtagning



1. Hvis der er folder på strømpen --> Før kuglerne hen over folderne, så de forsvinder.

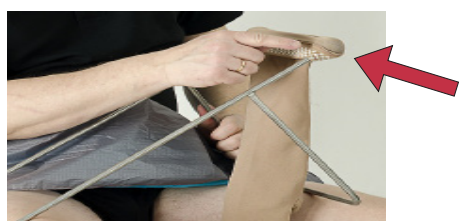

2. Hvis borgeren har svært ved at få foden ud af strømpen--> Det skyldes ofte at de blå kugler sidder for langt nede i strømpen eller for langt fremme i strømpen og derved mindskes elasticiteten. Husk at de blå kugler skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet og bagpå benet (billedet).

Aftagning



1. Hvis borgeren har sårbar hud--> Lav en fold på strømpen ved aftagning, så kuglerne ikke kommer i berøring med huden.



2. Hvis borgeren har svært ved at anvendes friktionspladen eksempelvis pga. for få kræfter i benet eller vanskeligheder ved at koordinere bevægelsen --> Anvend aftager på hjul.



3. Hvis borgeren har svært ved at få foden ud af strømpen--> Skyldes det ofte at kuglerne sidder for langt nede i strømpen og derved mindsker elasticiteten. Husk at kuglerne skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet.



Danish CARE Supply
- fremtidens hjælpemidler

Danish CARE Supply

Alsikevej 8

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply