



Danish **CARE** Supply
- fremtidens hjælpemidler

MAXI-SLIDE - lang op til lysken

Effektivt glidestykke beregnet til på- og aftagning af lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå. Den er designet til at kunne nå hele vejen rundet om benets læg og helt op til lysken. Maxi Slide giver en ekstra god aflastning for borgeren og for hjælperen.

Kan anvendes både til en enkelt lysken strømpe og til strømpebukser (2 slides).

Bemærk venligst at der er syet lufthuller i siderne af Maxi sliden, sådan at luften kan komme ud af glidestykket.

SÆT X	HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Lægomkreds	Mål på slide	
					Bredde	Længde
	102594	3015	MAXI - SLIDE - LANG - MEDIUM	Op til 45 cm	45 cm	120 cm
	102595	3016	MAXI - SLIDE - LANG - BRED	Over 45 cm	57 cm	120 cm
	110866	3019	MAXI - SLIDE - LANG - EKSTRA BRED	Over 45 cm	85 cm	120 cm
	212292	3042	MAXI - SLIDE - LANG - EKSTRA EKSTRA BRED	Over 45 cm	100 cm	120 cm



www.danishcaresupply.dk

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere



> Påtagning



1. Sæt foden på den bløde side af glidestykket, så der er et godt stykke af slippen foran foden. Fastgør velcrobåndet rundt om låret.



2. Buk dig ned eller sæt benet over kors og fold slippen op over tæerne.



3. Sæt strømpen på, tag fat i kantbåndet og træk strømpen op ad benet. Vær opmærksom på, at glidestykket er foldet så meget omkring benet som muligt.



4. Tag handsker på og før med flad hånd strømpen rundt om hælen.



5. Fordel kompressionen ved hjælp af handskerne, indtil strømpen er på plads.



6. Tag velcrobåndet af.



Rengøring: Vaskes i hånden ved max 30° C.

Materiale: Blød spilerdug



Youtube
Video





7. Træk strømpen det sidste stykke op og sæt strømpen på plads.



8. Træk slippet ud af strømpen.

> Aftagning



1. Start med at sætte benet ind i sliden som vist på billedet.



2. Sæt nu velcrobåndet "lidt" løst rundt lige ovenfor hælen.



3. Tag handsker på og skub med flade hænder strømpen rundt om hælen, og træk strømpen det sidste stykke af foden.

> Hvis det kniber med på- og aftagning?



Hvis det kniber med at få strømpen rundt om hælen i på- og/eller aftagning af kompressionsstrømper, kan vi anbefale at anvende en blå friktionsplade.





Vi har markedets største sortiment og know-how indenfor på- og aftagning af kompressionsstrømper. Vi hjælper dig gerne med at udvælge det rette hjælpemiddel, som passer bedst til dine behov.

Kontakt os på telefon: 22118616 eller på mail: dcs@danishcaresupply.dk


> På- og aftagere



> Doff N' Donner




> Glidestykker - på/af

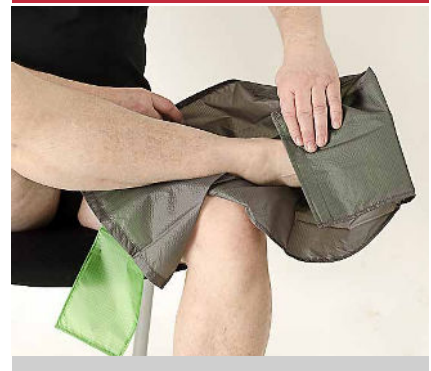

> Elektrisk aftager



> Handsker

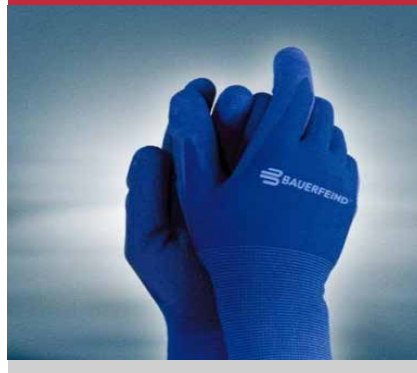

> Spilerdug



Få mere inspiration på vores webshop www.danishcaresupply.dk eller besøg gerne vores fysiske butik i Randers.

Vi har et stort program indenfor småhjælpemidler, som kan gøre hverdagen lidt lettere.

På gensyn...

Danish CARE Supply

Alsikevej 8

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på
facebook

facebook.com/danishcaresupply