



Danish **CARE** Supply
- fremtidens hjælpemidler

SLIP-FOD

Beregnet til på- og aftagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

Vi anbefaler brug af handsker sammen med slip i forbindelse med på- og aftagning af kompressionsstrømper. Slip-Fod findes i to bredder.

SÆT X	HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Lægomkreds i cm	Mål på slip	
					Bredde i cm	Længde i cm
	72623	3010	SLIP - FOD	Op til 40	19	95
	72624	3011	SLIP - FOD - BRED	Over 40	36	95



www.danishcaresupply.dk

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere



> Påtagning

1. Sæt benet over kors eller buk dig ned til foden.



A. Åben tå: luk velcroen så der bliver dannet en lille fold, som du sætter på tæerne.



B. Lukket tå: Sæt slippen mellem tæerne.



2. Sæt strømpen på foden og træk strømpen op ad benet.



3. Tag handsker på og gnid med flad hånd strømpen rundt om hælen.



4. Træk strømpen helt op.



4. Åben velcroen og træk i den del af slippen, der vender væk fra huden og træk slippen ud.



> Aftagning



1. Lav en løkke af glidestykket rundt om anklen, så hælen er dækket. Hold godt fast i glidestykket.



2. Fold strømpekanten ud over glidestykket og træk strømpen ned om hælen.



3. Tag handsker på. Gnid med flad hånd strømpen af hælen og træk strømpen af.



4. Tag handsker på og glid strømpen rundt om hælen til strømpen kommer af.

> Hvis det kniber med på- og aftagning?



Hvis det kniber med at få strømpen rundt om hælen i på- og/eller aftagning af kompressionsstrømper, kan vi anbefale at anvende en blå friktionsplade.



Rengøring: Vaskes i hånden ved max 30° C.

Materiale: Blød spilderdug



Youtube
Video





Vi har markedets største sortiment og know-how indenfor på- og afgang af kompressionsstrømper. Vi hjælper dig gerne med at udvælge det rette hjælpemiddel, som passer bedst til dine behov.

Kontakt os på telefon: 221 1 8616 eller på mail: dcs@danishcaresupply.dk


➤ På- og aftagere



➤ Doff N' Donner



➤ Glidestykker - på/af

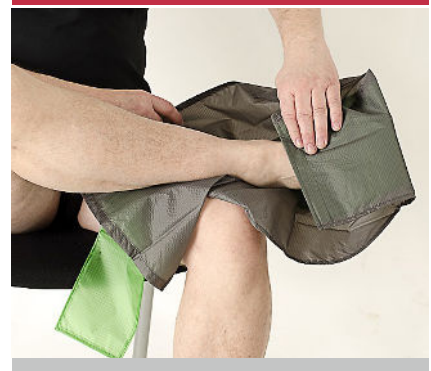

➤ Elektrisk aftager



➤ Handsker



➤ Spilerdug



Få mere inspiration på vores webshop www.danishcaresupply.dk eller besøg gerne vores fysiske butik i Randers. Vi har et stort program indenfor småhjælpemidler, som kan gøre hverdagen lidt lettere.

På gensyn...

Danish CARE Supply

Alsikevej 8

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på
facebook

facebook.com/danishcaresupply