

## BRUGSANVISNING:

Justérbart ryglæn

Varenr. 148015

HMI nr. 44877

### Generel sikkerhedsadvarsel

Sørg for, at disse instruktioner er fuldt ud læst og implementeret. Undladelse af at gøre dette kan medføre personskaade. Behold dette dokument et sikkert sted til fremtidig reference.



Maks. brugervægt



### Anvendelse:

Den justerbare rygstøtte er beregnet til at understøtte den enkelte bruger i en valgt skrå position, mens brugeren sidder i sengen. Den placeres oven på madrassen og eventuelt under støttepuder.

### Sikkerhedsforanstaltninger:

Sørg for, at bæreamen er korrekt monteret i placeringspunkterne før brugeren læner sig tilbage på rygstøtten. Sørg for, at sengen enten er udstyret med en fast hovedgærde eller, at sengen er placeret mod en væg, så rygstøtterne ikke glider baglæns under brug. Kontroller regelmæssigt stabiliteten og stivhed af rygstøtten, om skruerne skal strammes, og om rygstøtten er i god stand inden brug.

### Rengøringsvejledning:

Fjern snavs eller støv ved hjælp af en blød, fugtig klud. Brug en mild vaskemiddel for at fjerne genstridige pletter. Tør efter med en blød klud. Til desinfektion på hospitalmiljøer, følg venligst specialisternes anbefalinger.

### Monteringsvejledning:

Hvis du følger linket nedenunder, vil du kunne se en video af installationen.  
<https://youtu.be/Lqgj8DEG9sc>

1. Placer støtten på sengens madras med bagkanten indmod hovedgærdet eller væggen.
2. Juster rygstøttens vinkel til ønsket position.
3. Placer en pude mod rygstøtten, hvis det ønskes.
4. Test for at sikre, at rygstøtten er fast og ikke kan bevæge sig baglæns. Rygstøtten er derefter klar til brug.

2023-05



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler