



 LivaWheel

BRUGSVEJLEDNING TIL LIVA HJUL

Hvad er Liva Hjul

Liva Hjul er et brugervenligt hjælpemiddel til personer med behov for hjælp til at sætte sig ind til spisebordet, i eget hjem og i institution.

Liva Hjul monteres på en spisebordsstol for at gøre den mobil ved kortere forflytninger indendørs, såsom ind til et spisebord og ud igen. Liva Hjul har en automatisk bremse for optimal sikkerhed, og stolen bliver kun hævet 5 mm.




Sikkerhedsinstruktion

1. Kontroller at hjælpemidlet ikke udviser tegn på beskadigelse.
2. Læs og forstå brugsvejledningen. Opbevar brugsvejledningen tilgængeligt for brugere af produktet.
3. Produktet er ikke et legetøj, og må ikke benyttes af børn under 15 år uden en voksens supervision.
4. Godkendt til brugervægt på 160 kg.

Installation

Produktet er tilpasset til stole med stoleben med dimensionerne op til 4x4 cm. og en bredde mellem stolebenene på 27 – 49 cm.

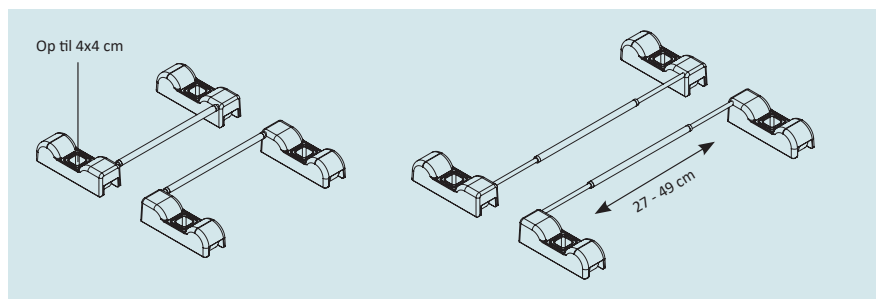

Installation

1. Placer stolen foran det bord, hvor den skal bruges.
2. Placer skøjterne bag stolebenene, juster stangen, så fordybningerne er præcis bag stolebenene.
3. Vend produktet så stangen er inde under stolesædet. (Brugerne bør ikke hvile fødderne på stangen).
4. Vælg den mindst mulige indsats, ud af de tre, som stolebenet kan være i og sæt den i fordybningen.
5. Løft først de forreste stoleben ned i fordybningerne og herefter de bagerste.
6. Juster stangen, så den er så kort som mulig.



Forflytning

Stolens hjul er bremset uden vægt. Når en bruger med en vægt på +42 kg. sidder på stolen påmonteret Liva Hjul, kan stolen trille frem og tilbage, når brugeren tager fat i spisebordet. Når brugeren rejser sig fra stolen, bremser hjulene.

Vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt produktet og sørg for at hjulene er fri for snavs og hår. Produktets overflade kan rengøres med sæbevand. Ved behov for desinficering kan anvendes 70% ethanol, 45% isopropanol eller lignende. Anvend ikke rengøringsmidler som indeholder klor, da disse kan skade materialet.

Transport af produktet

Gør stangen mellem skøjterne så kort som muligt, hvorefter hjælpemidlet let kan tages med uden for hjemmet/institutionen. Opbevar det i den æske produktet blev modtaget i fra forhandleren under transporten. Produktet vejer 2 kg.



Liva Hjul har bløde hjul, som ikke ridser gulvet. De bløde hjul kan ikke trille på tæpper.

Testet og godkendt produkt

CE Medicinsk udstyr klasse 1 produkt.

Liva Hjul er af højeste kvalitet og opfylder de krav der stilles til denne type hjælpemidler på pleje- og omsorgsområdet. Produktet er testet og godkendt på Teknologisk Institut efter gældende standarder. Produktet opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr MDR 2017/745. Produktet er patentanmeldt.

Ved spørgsmål om produktet kontakt din lokale forhandler eller se mere på www.livawheel.dk.



Alle dele af produktet
kan genanvendes

 **LivaWheel**

Produceret i Danmark af
LivaWheel ApS, Hybenvænget 6, 4180 Sorø