



Varenummer 1000021293



Tapeble, ABENA Slip, XL2, hvid, med orange tryk, Premium

- ✓ Effektiv kerne med Top-Dry teknologi
- ✓ 360 graders lækagebarrierer, der forhindrer lækage hele vejen rundt
- ✓ Formede benelastikker bidrager til optimal pasform
- ✓ Vådindikator med gradueringskala
- ✓ Understøtter en sund hud



Produktbeskrivelse

ABENA Slip er vores førsteklasses serie af fuldt åndbare, anatomisk formede tapebleer til moderat til svær inkontinens. Den effektive kerne med Top-Dry teknologi sikrer hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger. En kombination af forskellige barrierer (synlige og usynlige) og elastikker (elastiske benudskæringer) giver en 360 graders lækagebeskyttelse. Kombinationen af disse funktionaliteter hjælper med at beskytte huden og opretholde en naturlig hudbalance. Odor-systemet minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener. Den fleksible kombitape af høj kvalitet med dobbelt tapefunktion sikrer optimal pasform og nem oplacering. Vådindikatoren med gradueringskala hjælper brugeren og plejepersonalet med at finde produktet med det rette absorptionsniveau og det rette tidspunkt for produktskift. De dermatologisk testede produkter bærer Svanemærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tapeble
Varemærke	ABENA
Vareserie	Slip
Størrelse	XL2
Farve	Hvid
Features	Med orange tryk
Materiale	ECF fluff, elasticated combi tape, PE, åndbar bagfolie, elastan, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	970 mm
Bredde	850 mm
Hoftevidde	110-170 cm
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	3400 ml
Køn	Unisex
Inkontinensgrad	Meget svær
Kvalitetsniveau	Premium
Certifikater	CE. Svanemærket. MD. UKCA.
Svanemærket licensnr.	5023 0001
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I

Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Tapeble til moderat til svær inkontinens designet til særligt krævende situationer og sengeliggende brugere. Serien er forsynet med et logisk tal-/bogstavsystem og en farvekodning, som gør det let at skelne mellem de forskellige størrelser og sugeevner. Det er vigtigt altid at måle hoftestørrelsen for at vælge den rigtige størrelse og vælge den korrekte sugeevne for at undgå lækager. Fold bleen på langs med bagsiden vendt udad. Før bleen forfra og bagud. Bred den forreste del af bleen ud, så der opstår en skålform mellem benene. Fastgør den nederste tape i begge sider med en let opadgående vinkel og fastgør dernæst den øverste tape med en nedadgående vinkel for at opnå en sikker og behagelig pasform. Produktet kan påsættes, når bruger er stående (også selvhjulpen) eller liggende. Se vores påsætningsvejledning for yderligere information.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	4 pk	61.6 cm	39.6 cm	37.7 cm	5713571000298
pk	21 stk	38 cm	16 cm	28 cm	5713571000281



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Lækagebarrierer i benudskæringen og omkring den absorberende kerne beskytter mod lækage og giver en optimal pasform.



Produktet er forsynet med elastiske tapestykker, der sikrer den bedste kombination af komfort, pasform og lægekagebeskyttelse. Tapestykkernes blå klæbeflader muliggør oplacering ad flere omgange.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Den højtydende kernes unikke struktur er designet til hurtig fordeling og indkapsling af urin, hvilket sikrer en tør overflade – også ved gentagne vandladninger.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Vådindikatoren er en væskefølsom strimmel, som skifter farve eller flyder ud, hvilket indikerer, hvor stor en del af produktet, der er udnyttet.



En kombination af 100% åndbarhed, Top-Dry og lækagebarrierer giver en tør overflade og sund hud, selv efter gentagne vandladninger, hvorved hudens naturlige pH-balance opretholdes.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Unik Top-Dry teknologi som sørger for hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger.



Dråbesystem, som viser produktets sugeevne. Jo flere dråber jo højere sugeevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Poser med dette symbol er fremstillet af 30% PCR (post-consumer recycled), hvilket vi på dansk kender som husstandssorteret plast. Således kan vi reducere vores plastikaffald og samtidig gøre en indsats for at passe på miljøet.

