



Brugermanual

CompressionAid

Danish **CARE** Supply
- fremtidens hjælpemidler

Smart og praktisk hjælpemiddel til at aflaste plejepersonale ved på- og afgang af støtte- kompressionsstrømper, sårpleje, mm.

CompressionAid er en innovativ benholder, som er velegnet til brug sammen med Doff N' Donner muffen, Slip-Perfect samt andre hjælpemidler.

CompressionAid er særligt velegnet til liggende borgere.

CompressionAid aflaster betydeligt hjælperens ryg, skuldre, arme og hænder.

CompressionAid kan anvendes til anlæggelse af cobanbind, sårbehandling og fodpleje.

Varenr: 360030

HMI nr.: 136861



www.danishcaresupply.dk

Danmarks største udvalg af strømpe på- og afgangere



1. Placer en hånd om knæhasen og en hånd omkring borgerens fod.



2. Bøj benet i ca. 90 gr. med en let glidende bevægelse af foden.



3. Før CompressionAid ind under benet.



4. Den højeste rulle skal placeres under knæet og den laveste rulle ved anklen.



5. Strømpen påført Doff N' Donner muffen placeres ved borgerens fod.



6. Muffen med støttestrømpen på rulles stille og roligt op ad benet.



7. Strømpen føres let hen over rullerne.
Kan gøres uden at borgeren skal løfte benet.



8. Doff N' Donner muffe rulles nu af borgerens ben – igen uden at løfte benet.



9. Benet bøjes igen op til ca. 90 gr.



10. CompressionAid beholder kan nu trækkes forsigtigt ud.





Specifikationer	
Længde på plade	37,5 cm
Bredde på plade	30 cm
Højde på plade	1 cm
Diameter på komfortruller	29 cm
Afstand ml. sorte stænger, længde	20 cm
Afstand ml. sorte stænger, bredde	18 cm
Vægt	2,66 kg.
Materiale	Den hvide plade er lavet i kompaktlaminat. De sorte ruller er lavet i PUR. De sorte rør der holder rullerne er lavet i POM.



Se instruktionsvideo af CompressionAid på youtube ved brug af QR kode.



Find CompressionAid og manual på HMI-basen ved brug af QR kode.



Tilbehør: CompressionsAid opbevaringsholder

Du kan tilkøbe en holder til CompressionsAid, så du kan hænge den op på væggen. Oven på holderen er der en plade med en ring i, som passer til Doff N' Donner keglen.

Varenr: 360031



Danish CARE Supply A/S
Alsikevej 8
8920 Randers NV
Telefon: +45 2211 8616
E-mail: dcs@danishcaresupply.dk
www.danishcaresupply.dk



Følg os på
facebook

facebook.com/danishcaresupply