

CompressionAid

Smart og praktisk hjælpemiddel til at aflaste plejepersonale ved på- og aftagning af støtte- kompressionsstrømper, sårpleje, mm.

Varenr: 360030

HMI nr.: 136861

Brugermanual

CompressionAid er en innovativ benholder til brug ved påtagning af støtte- og kompressionsstrømper.

CompressionAid er velegnet til brug sammen med Doff N' Donner muffen samt andre hjælpemidler. Den er særligt velegnet til liggende borgere.

CompressionAid aflaster betydeligt hjælperens ryg, skuldre, arme og hænder.





Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

1. Placer en hånd om knæhasen og en hånd omkring borgerens fod.



2. Bøj benet i ca. 90 gr. med en let glidende bevægelse af foden.



3. Før CompressionAid ind under benet.



4. Den højeste rulle skal placeres under knæet og den laveste rulle ved anklen.



5. Strømpen påført Doff N' Donner muffen placeres ved borgerens fod.



6. Muffen med støttestrømpen på rulles stille og roligt op ad benet.





Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

7. Strømpen føres let hen over rullerne. Kan gøres uden at borgeren skal løfte benet.



8. Doff N' Donner muffe rulles nu af borgerens ben – igen uden at løfte benet.



9. Benet bøjes igen op til ca. 90 gr.



10. CompressionAid benholder kan nu trækkes forsigtigt ud.



Tilbehør: CompressionsAid opbevaringsholder, varenr. 360031

Du kan tilkøbe en holder til CompressionsAid, så du kan hænge den op på væggen. Oven på holderen er der en plade med en ring i, som passer til Doff N' Donner keglen.

