


Brugervejledning til HelpSoq Armforlænger

1




Tag forsigtigt ringen af HelpSoq med tommelfingrene på kanten.

2

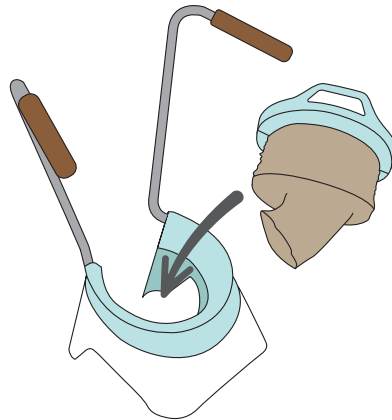

Sæt ringen med strømpen (tæerne fremad, mod åbningen) ind i armforlænger.


3

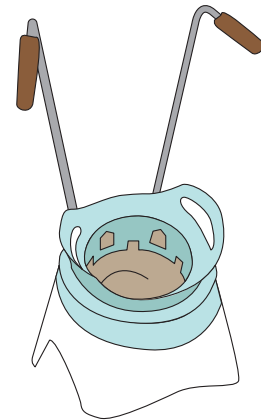

Placer den på gulvet med håndtagene vendt mod dig.


Brugervejledning til HelpSoq Armforlænger (fortsat)

4

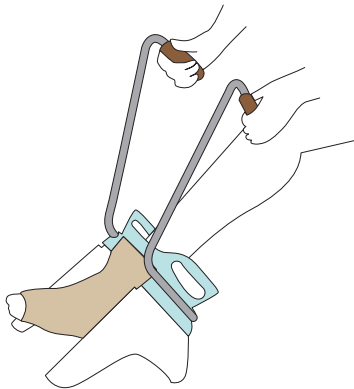


Før foden ind i strømpen, indtil hælen er på det rigtige sted.

5

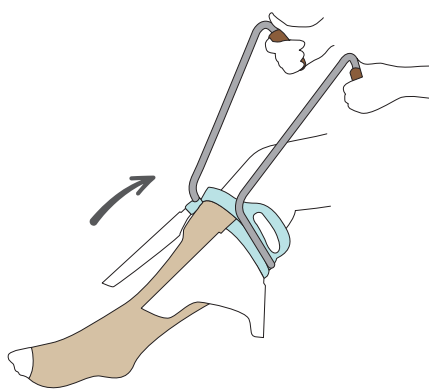

Løft håndtagene, og strømpen rulles ud på benet.

6

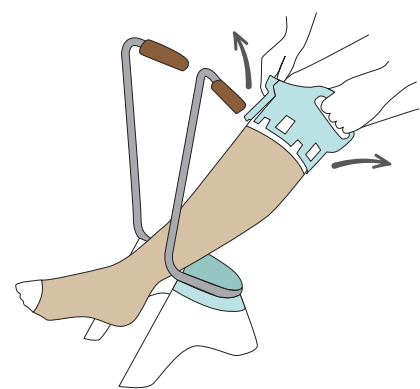

Sæt armforlængerens tilbage på gulvet. Træk ringen længere op, og klik åben.