



Instruktioner til brug af HelpSoq

1. Sæt strøm til HelpSoq og sæt ringen på.

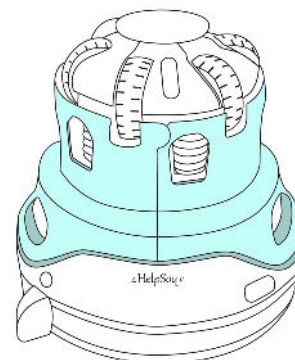


2.

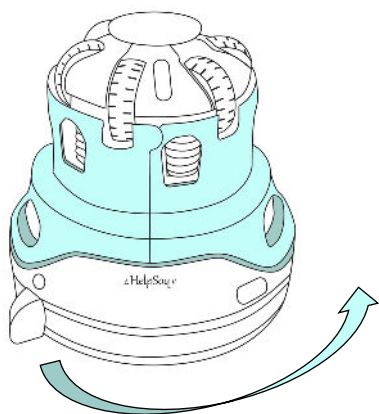


Skub knappen helt til højre over til start. Nu vil hjulene dreje.

3.

Placer strømpen **oven fra** på de 4 hjul.

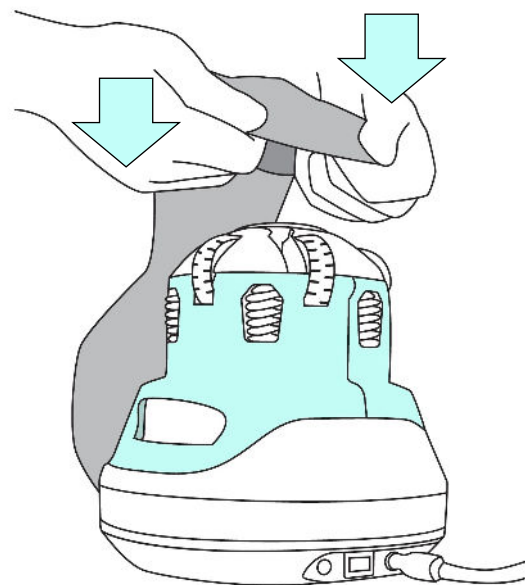

4. Hold strømpen som en spids hat. Når hælen er helt på ringen, er den færdig. Skub derefter knappen tilbage helt til venstre.

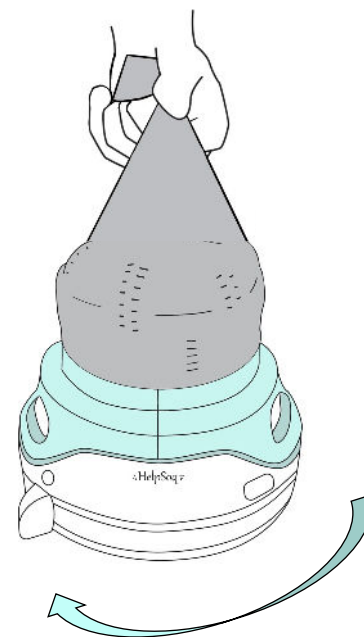


5.



Fjern forsigtigt ringen, mens tommelfingrene holder på kanten.

6.

Træk nu strømpen over hæler med fingrene på kanten.

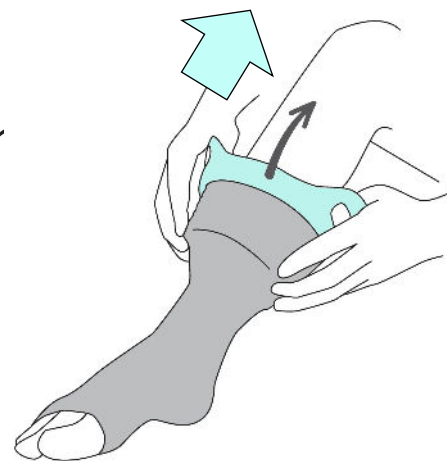

7.



Når strømpen er på, åbnes og fjernes ringen.