

Steve⁺

Strømpe på- og aftager til kompressionsstrømper

Denne strømpepåtager kan anvendes til på- og aftagning af knælange og lyskenlange kompressionsstrømper med åben og lukket tå. Du kan anvende Steve+ siddende på en stol, hvor du kan tage strømpen på foden uden at skulle kunne bøje dig fremover.

Det er let at samle strømpepåtageren uden brug af værktøj, og den kan let skilles ad igen og medtages på rejsen.

Steve+ kan fås i 4 forskellige størrelser afhængig af omkredsen på det bredeste sted på læggen. I denne manual kan du finde en enkel instruktion til, hvordan du kan bruge strømpestativet til både på- og aftagning.

Det anbefales, at der anvendes handsker beregnet til brug til påtagning af støtte – og kompressionsstrømper.

Ved køb af STEVE+ På- og aftager til kompressionsstrømper medfølger der nu Steve Handsker. Handskerne leveres i følgende størrelser afhængigt af den valgte produktstørrelse:

- **Steve+ Small:** Medfølger Steve Handsker str. M
- **Steve+ Medium og Large:** Medfølger Steve Handsker str. L

YouTube:



HMI:



De 4 størrelser er:

HMI nr.	Varenr.	Varenavn	Lægomkreds	Ny version*
129008	870000	Steve+ - ekstra small - XS	25-30 cm	Afventer
129009	870001	Steve+ - small - S	30-38 cm	Afventer
129010	870002	Steve+ - Medium - M	38-46 cm	01/09/2026
129011	870003	Steve+ - Large - L	46-54 cm	Afventer


Se også vores instruktionsvideo på: www.danishcaresupply.dk. Du kan indtaste varenr. i søgefeltet, og så kommer du direkte ind på produktet og kan se videoen.

** Samlingen mellem den sorte skinne og den grønne base på Steve+ opdateres i løbet af 2026. Ændringen påvirker ikke produktets specifikationer, og Steve+ fortsætter med uændret varenummer og HMI-nummer.*

Påtagning af strømpen




Tag fat i strømpekanten og før strømpen ned over den sorte strømpeholder. Husk at hælen på strømpen skal vende ind mod den sorte strømpeholder.

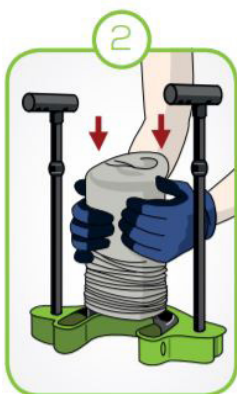

Tag dine handsker på og tag fat med flad hånd på begge sider af strømpen og skub strømpen ned over holderen.



Når du sidder på stolen, er du klar til at føre foden ned i strømpen. Foden bøjes og skubbes ned i strømpen, mens du trækker i de to håndtag. Lav små træk op ad benet. Hvis du skulle opleve, at det er svært at få foden ned ind i strømpen, så kan du putte et glidestykke ned i strømpen. På den måde reducerer du friktionen imellem dit ben og strømpen.

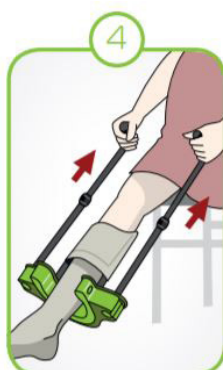


Når strømpen er kommet op ad benet, så tag strømpen af strømpepåtageren inden den kommer helt op til knæet. På den måde kan du undgå, at strømpen bliver trukket lidt for højt op. Hvis dette alligevel skulle ske, så kan du rette på strømpen med dine handsker

Aftagning af strømpen - mulighed 1

Her tages strømpen af FORFRA og uden at klikke den sorte strømpeholder af stativet.



Tag den løse sorte ring (D) og sæt den omkring dit ben lige under knæet, så den kommer til at sidde inde under strømpen. Navnet "Steve" er påtrykt den sorte ring og skal vende op ad og åbningen skal være vendt fremad.

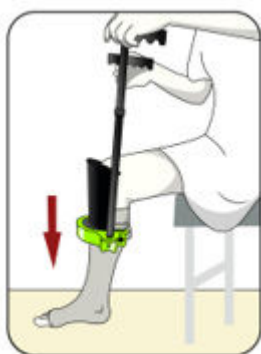

Tag stativet og placer Steve på ringen fra forsiden af dit ben. sørg for at den grønne base får fat i den sorte ring, der sidder inde under strømpen.



Skub nu stativet nedad indtil strømpen kommer rundt om hælen.



Træk nu foden ind mod dig selv, indtil strømpen kommer helt af. Der kan med fordel anvendes en friktionsplade til at gnide hælen på, så går det lettere at få strømpen omkring hælen og foden helt ud af strømpen.

Aftagning af strømpen - mulighed 2


Her tages strømpen af BAGFRA og hvor den sorte strømpeholder tages af stativet.



Tag den løse sorte ring (D) og sæt den omkring dit ben lige under knæet, så den kommer til at sidde inde under strømpen. Navnet "Steve" er påtrykt den sorte ring og skal vende op ad.



Start med at klikke den sorte strømpeholder af den grønne base. Tag fat i stativet og sørg for at den grønne base får fat i den sorte ring, der sidder inde under strømpen.

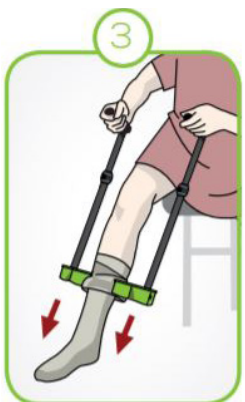


Skub nu stativet nedad indtil strømpen kommer rundt om hælen.



Træk nu foden ind mod dig selv, indtil strømpen kommer helt af. Der kan med fordel anvendes en friktionsplade til at gnide hælen på, så går det lettere at få strømpen omkring hælen og foden helt ud af strømpen.

Samling af Steve⁺ strømpepåtager

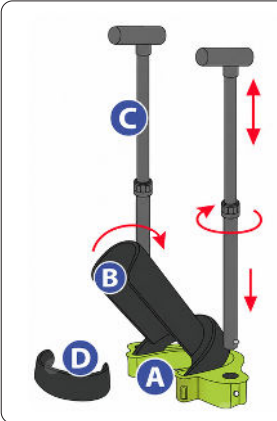	Gammel version Start med at sætte den sorte strømpeholder(B) i den grønne holder(A). Sørg for at den er klikket i de 2 huller på den grønne holder.		Ny version Start med at sætte den sorte strømpeholder(B) i den grønne base som vist på billedet. Tryk derefter den sorte holder ned i den grønne base så det siger klik.(A).
	Sæt stængerne sammen som vist på billedet og drej den sorte ring rundt til, den sidder fast.		
	Sæt de 2 sorte stænger med håndtag ned i de 2 huller oven på den grønne holder. Sæt dig ned på stolen. Nu kan du let at indstille højden på stængerne, så de passer til dit behov og det føles rigtigt, når du trækker i de håndtag. Nu er du klar til at gå i gang.		

Bemærk venligst: Den sorte ring(D) skal kun anvendes til aftagning af kompressionsstrømpen.

Rengøring: Afvaskes med mildt sæbevand

Materiale: Hård plast og stænger i Aluminium - Vægt: Fra 0,9 kg – 1,2 kg.



Leverandør: Danish Care Supply, Telefon: +45 22118616, Mail: dcx@danishcaresupply.dk
 Du kan se Danmarks største udvalg af hjælpemidler på www.danishcaresupply.dk Her finder du også vores adresse og åbningstider på den fysiske butik i Randers.